

仕様・寸法

● 仕様

	BAL-O / BAL-OW	BAL-1	BAL-2	BAL-3	BAL-4	BAL-7	BAL-7SP	BAL-8	BAL-8SP
フレーム材質	アルミ								
シート材質	ポリエステル	W4: ポリエチレン(PE) / A-2: ポリエステル				ナイロン			
グリップ	エンボスグリップ								
バックサポート	スリング					ワンタッチソフトシート			
背折れ	なし	あり レバー式							
アームサポート	ウレタン					木製	ウレタン	木製	ウレタン
サイドガード	樹脂								
足台可動	固定			スイングアウト		固定			
フットサポート	軽量ステップ 黒								
キャスト	6" ソリッドキャスト					6" ソフトフォーミングキャスト			
タイヤ	22PU ハイポリマータイヤ		16PU ハイポリマー タイヤ	22PU ハイポリマー タイヤ	16PU ハイポリマー タイヤ	22軽量 エアー タイヤ	22細PU ハイポリマー タイヤ	16 エアー タイヤ	16PU ハイポリマー タイヤ
介助ブレーキ	なし	あり				なし	あり	なし	あり
ハンドリム	プラスチックハンドリム		なし	プラスチック ハンドリム	なし	プラスチックハンドリム		なし	
駐車用ブレーキ	BAL標準ブレーキ			PNWブレーキ		SKブレーキ			

● 寸法

単位: mm

	BAL-O	BAL-OW	BAL-1	BAL-2	BAL-3	BAL-4	BAL-7	BAL-7SP	BAL-8	BAL-8SP
シート幅	400	440	400	400	400	400	400*2	400*2	400*2	400*2
全幅	630	670	640	590	600	545	580	580	530	530
レグパイプ長	360±20	360±20	360±20	360±20	370±20	370±20	360±20	360±20	360±20	360±20
全高	860	860	865	885	865	885	860	860	860	860
全長	980	980	980	965	985	960	950	950	930	930
バックサポート高	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
後座高	410	410	410	440	410	435	410	410	410	410
シート奥行	400	400	400	400	400	400	380	380	380	380
アームサポート高	220	220	220	220	225	225	225	225	225	225
前座高	435	435	435	465	435	465	435	435	435	435
キャスト	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ
駆動輪・主輪	22インチ	22インチ	22インチ	16インチ	22インチ	16インチ	22インチ	22インチ	16インチ	16インチ
折りたたみ時の全長	965	965	965	865	730(965)*1	665(900)*1	930	930	840	840
折りたたみ時の全高	860	860	670	690	670	695	670	670	670	670
折りたたみ時の全幅	335	335	335	270	345	275	330	330	270	270
重量	11.8kg	12.0kg	12.9kg	11.5kg	14.7kg	13.2kg	9.9kg	11.7kg	8.9kg	10.4kg

*1 ()内はフット・レグサポートを取り付けたままのサイズです。
*2 サイドガード内々の寸法になります。

製造元

Wheel Chair
Miki

株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

BALシリーズ

BAL-O / BAL-OW / BAL-1 / BAL-2 / BAL-3 / BAL-4
BAL-7 / BAL-7SP / BAL-8 / BAL-8SP

補足取扱説明書

本書は、BALシリーズ(BAL-O、BAL-OW、BAL-1、BAL-2、BAL-3、BAL-4、BAL-7、BAL-7SP、BAL-8、BAL-8SP)共通の補足取扱説明書になります。本書では、機種ごとに装備が異なる項目には、該当機種を記載しております。該当機種を確認いただき、ご自分の車いすに関する項目をお読みください。ご使用前に本書と別冊「標準車いす取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体状況・環境の変化に合わせて、必要なときにお読みください。

使用目的・特徴

本製品は手動式車いすで、一人乗り用です。これに搭乗しての移動と、休息を目的としています。本製品は、特別な身体保持具、バックサポート(背)・座位の角度調整機構等がなく、使用者がハンドリムを操作して駆動する手動式の自走用標準形車いすです。(BAL-2、BAL-4、BAL-8、BAL-8SPの場合、介助者が操作する介助用標準形車いすです。)日常生活用に設計されており、特殊な使用目的(スポーツ・入浴など)のものではありません。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるとときに、下記のものが入っていることを確認してください。

- ・車いす本体
- ・取扱説明書(本書)、標準車いす取扱説明書 各1ヶ
- ・工具(スパナ2ヶ 六角レンチ 5mm、4mm、3mm 各1ヶ)
- ・保証書

⚠ 警告


該当機種: BAL-1 / BAL-2 / BAL-3 / BAL-4 / BAL-7 / BAL-7SP / BAL-8 / BAL-8SP

使用する前に、両側の背折れジョイントが確実にロックされていることを確認してください。
ロックされていないと、使用者が後方に転倒する恐れがあります。

⚠ 注意

該当機種: BAL-3 / BAL-4

車いすを開いた際、シートパイプ受けに、シートパイプがしっかりとハマっていることを確認してください。
シートパイプ受けにシートパイプをはめ込むことで、ガタつきをなくす構造になっています。
※しっかりとハマっていない場合は、シートパイプの中央付近を押してはめてください。押す時は、シートパイプの先端を押さないでください。フレームが変形する恐れがあります。

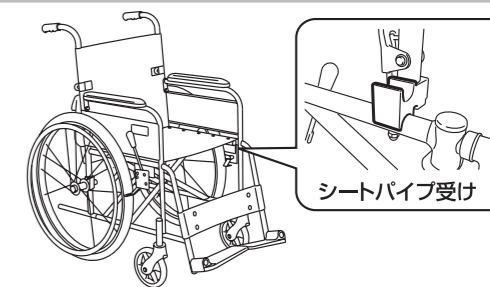

制動用ブレーキのかけかた

該当機種: BAL-1 / BAL-2 / BAL-3 / BAL-4 / BAL-7SP / BAL-8SP

⚠ 危険

- ・スピードを出さないでください。スピードが出ているときに急カーブを走行したり、急ブレーキをかけたりすると、転倒して事故やけがにつながる恐れがあります。
- ・急な下り坂で介助するときは、後ろ向きにゆっくり降りてください。また、制動用ブレーキを使いスピードを落としてください。

⚠ 警告

ブレーキは、介助者がブレーキレバーを左右同時に握ってかけてください。転倒して事故やけがにつながる恐れがあります。

介助者が、左右の手押しハンドル下の制動用ブレーキレバーを握ってかけます。
ブレーキレバーを放すと解除されます。

⚠ 注意

ブレーキワイヤーは、安全のため定期的に交換してください。
(交換の目安: 1年に1度)

