


# 車いす / CRTシリーズ 補足取扱説明書

ご使用前に、本書と別冊「車いす / CRT シリーズ 取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。

また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管し、使用者の身体の状態・環境の変化に合わせて、必要なお読みください。

## シート取り付けの注意点

- 1 シートの取り付けは車いすを軽く開いた状態で行ってください。  
車いすが完全に開いた状態だと適切に取り付けられない場合があります。
- 2 背シートの黒いベルトを巻き付ける際、ブレーキワイヤーと一緒に巻かないようにしてください。
- 3 (CRT-3/4/7/8/3Lo/4Lo/7Lo/8Loのみ)  
背シートの一番下のベルトは、背パイプ補強プレートを通してください。

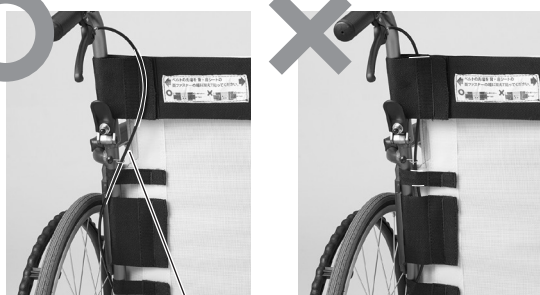

ブレーキワイヤー




背パイプ補強プレート


ベルト

- 4 黒いベルトは斜めにならないよう、まっすぐ貼りつけてください。
- 5 黒いベルトの先端と、シートの面ファスナーの端を揃えてください。


背シート

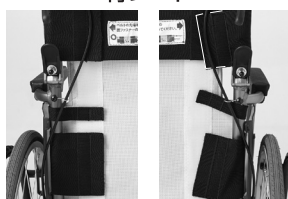


背シート

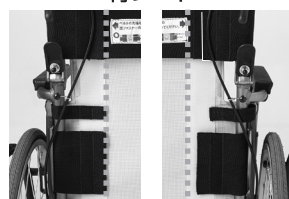

座シート

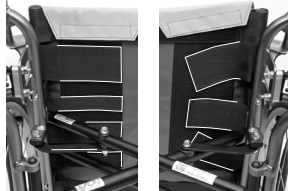

座シート

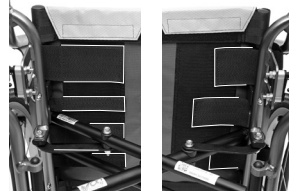

- 6 シートやベルトが背折れジョイントやフレームに噛み込んでいないか確認してください。
- 7 シートとベルトを両側から押さえて面ファスナーをしっかりと接着させてください。
- 8 取り付けが完了したらシートに力を加えて、確実に固定されていることを確認してください。