

# グランドフリッチャー・ユニダッシュ\_EX/ グランドフリッチャー・ユニダッシュ\_SX

[型式：M-GF・Uni Dash\_EX/M-GF・Uni Dash\_SX]

## 補足取扱説明書

ご使用前に、本書と別冊「グランドフリッチャー・ユニ\_EX/グランドフリッチャー・ユニ\_SX取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。

また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管し、利用者の身体の状態・環境の変化に応じて再読してください。

### はじめに

下表を参考に別冊「グランドフリッチャー・ユニ\_EX/グランドフリッチャー・ユニ\_SX取扱説明書」の該当ページを本書に読みかえてください。

尚、イラストの変更はありますが基本的な機能・注意点は同じです。


項目	本書	別冊「グランドフリッチャー・ユニ_EX/ グランドフリッチャー・ユニ_SX取扱説明書」
足踏みブレーキの使いかた	表面	P8 中央右
フット・レッグサポートの開閉・取り外し (スイングアウト機能)	表面	P13

※本書で使用しているイラストは、ご購入いただいた製品と異なる場合があります。

### ● 足踏みブレーキの使いかた **EX** **SX**

介助者が、左右の足踏みブレーキペダルを踏み込みます。  
(駐車用ブレーキがかかります。)

ブレーキペダル前方を足で前に押し出すと、ブレーキペダルが元の位置に戻り、ブレーキが解除されます。

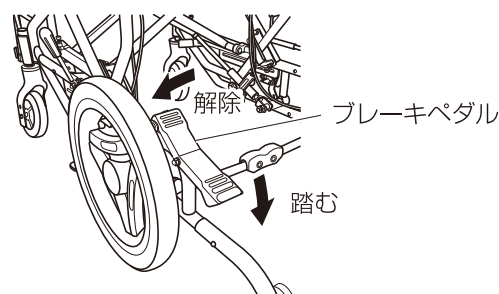

### ● フット・レッグサポートの開閉・取り外し(スイングアウト機能) **EX** **SX**


フット・レッグサポートをワンタッチで開閉することができます。車いすへの乗り降りの際、フット・レッグサポートが脚にぶつかることなくスムーズに移乗することができます。

#### ⚠ 警告

- ・フット・レッグサポートの開閉・取り外し・取り付けは、必ず両輪の駐車用ブレーキをかけてから行ってください。
- ・フット・レッグサポートを持って車いすを持ち上げないでください。  
部品が外れて使用者が転倒、落下すると、事故やけがにつながる恐れがあります。
- ・開閉時、フック部に身体や衣服が引っ掛からないように注意してください。  
けがをする恐れがあります。
- ・乗り降りの際、スイングアウト部に身体や衣服が引っ掛からないように注意してください。  
転倒など事故やけがにつながる恐れがあります。

## ● 開きかた

- 1 駐車用ブレーキのレバーを引くか、または足踏みブレーキ(オプション)を踏んで、両輪のブレーキをかけます。
- 2 回転レバーを矢印の方向に引き、そのままフット・レッグサポートを外側に回転させて開きます。

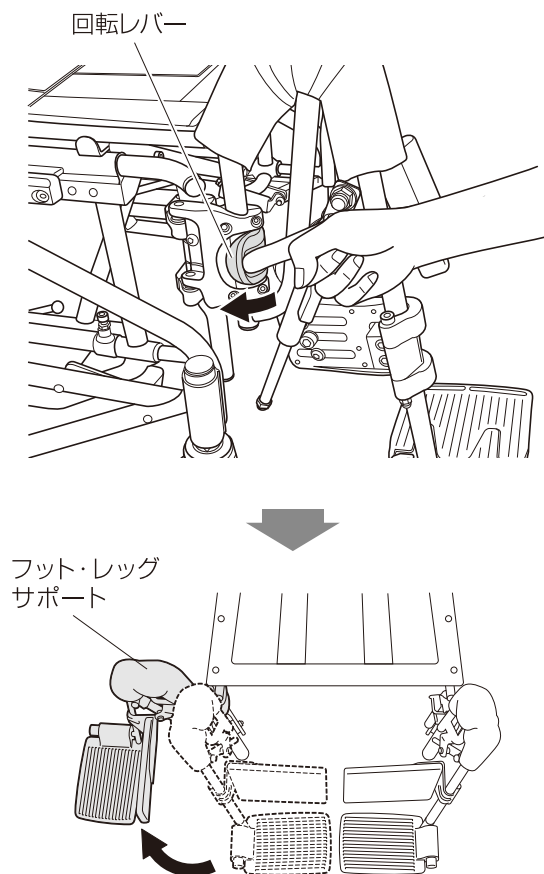

## ● 閉じかた



フット・レッグサポートを閉じるときに、指をはさまないように注意してください。


- 1 駐車用ブレーキのレバーを引くか、または足踏みブレーキ(オプション)を踏んで、両輪のブレーキをかけます。
- 2 フット・レッグサポートを内側に回転させて閉じます。閉じた後、フット・レッグサポートが完全にロックされたことを確認します。

## ● 取り外しかた

- 1 駐車用ブレーキのレバーを引くか、または足踏みブレーキ(オプション)を踏んで、両輪のブレーキをかけます。
- 2 フット・レッグサポートを外側に開いた状態で、垂直に引き上げます。

## ● 取り付けかた

- 1 駐車用ブレーキのレバーを引くか、または足踏みブレーキ(オプション)を踏んで、両輪のブレーキをかけます。
- 2 車体フレーム側の2つのピンにフット・レッグサポート側の回転軸穴(2箇所)を合わせてはめ込みます。

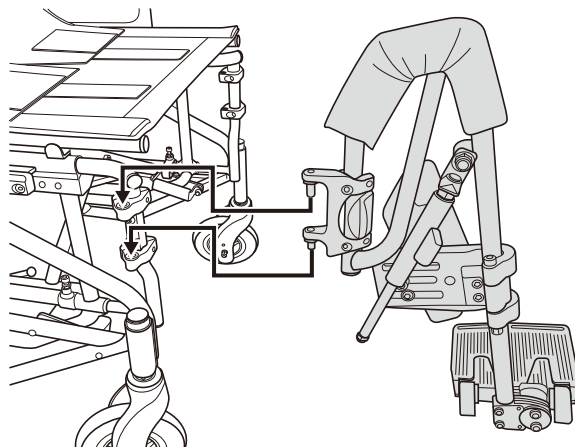

- 3 フット・レッグサポートを内側に回転させて閉じます。閉じた後、フット・レッグサポートが完全にロックされたことを確認します。

\* フット・レッグサポートを閉じるときに、指をはさまないように注意してください。

\* フット・レッグサポートを開いた状態で、フット・レッグサポートに力を加えないでください。金具が変形し故障の原因となります。

\* 多機能型フットサポートの場合、フット・レッグサポートの角度を下げた状態では、メカロックがキャスターラックに干渉してしまいます。

## 製造元

Wheel Chair  
**Miki** 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号  
《商品に関するお問い合わせは(株)ミキ 受注センターまで》  
TEL 0568-66-6333 FAX 0568-66-6335

車いすの廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。