


**MiKi** —特殊仕様—

オアシスシリーズ

# フローラ

取扱説明書

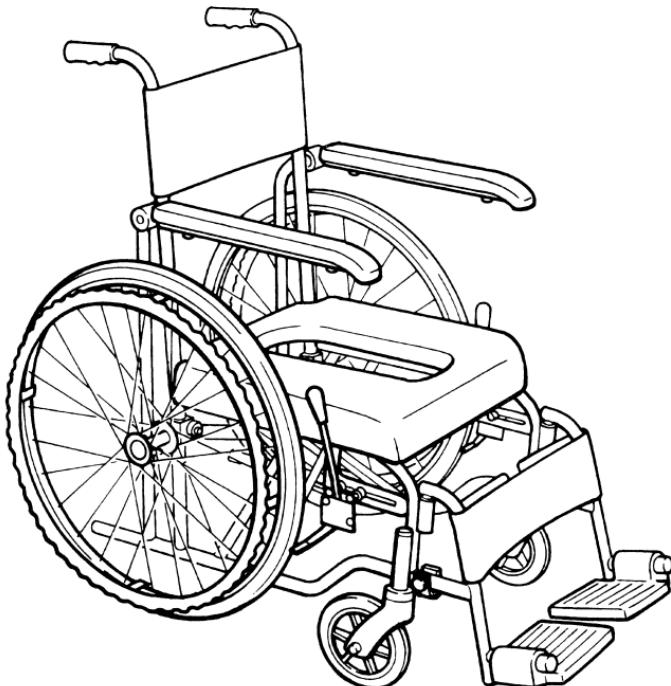

ご使用前には必ずお読みください。

## はじめに

この度は、フローラをお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読み頂き、確実に理解してください。そして適切な取り扱いと保守をしてください。また本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。  
本製品はシャワー室等で使用するのに最適な車いすです。

## 目次

はじめに .....	1
目次 .....	1
危険・警告・注意 .....	2
1. 各部の名称 .....	4
2. 開きかた .....	5
3. シャワーパットの取り付け・取り外し .....	6
4. たたみかた .....	6
5. 乗り降りの例 .....	7
6. 日常車いすとして使用する場合 .....	8
7. 浴室での使用について .....	9
8. 保守・点検 .....	9
9. 走行場所 .....	10
10. 段の上がりかた .....	10
留意 .....	10

※ 本書の内容は、製品改良のため予告なく変更をすることがあります。



## 危 險

【死亡または重傷を招くもの】



- スピードを出さないでください。

スピードが出ている時の急カーブ・急ブレーキは、転倒し大変危険です。

- ・ 下り坂の場合、介助をする時は後ろ向きにゆっくり降りてください。
- ・ 下り坂の場合、自操の時はハンドリムを使いスピードを落とし、必ず前向きで降りてください。不安な場合は助けてもらってください。



## 警 告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 乗り降りの際には必ず両輪にブレーキをかけてください。

浴室でのご使用、および乗り降りの際は、動かないように必ず両輪にブレーキをかけてください。


- 乗り降りの際にはステップに乗らないでください。

車いすが持ち上がり転倒します。

- 背シートのマジックテープをしっかりと止めてください。

背シートは取り外し可能となっています。外れると転倒するおそれがあるので、ご使用前および長さ調節後には、マジックテープがしっかりと止まっていることを確認してください。

- 肘掛けに全体重をかけないでください。

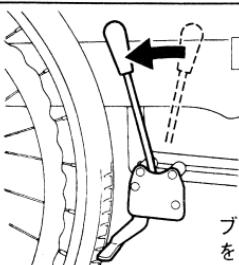


乗り降りの際  
ステップに乗らない


## ⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招くもの】

- 本製品を改造して使用しないでください。
- シート等が汚れたら中性洗剤等で拭き取ってください。  
シンナー・ベンジン等の有機溶剤類は使用しないでください。
- 車いすをたたむときは、アームレストを握らないでください。  
手を挟みケガをするおそれがあります。
- シャワーパットを取り付けずに直接座らないでください。
- 乗る前に車輪・キャスター・ブレーキ・ステップ等のネジを点検し、ゆるんでいる時は増し締めをしてください。

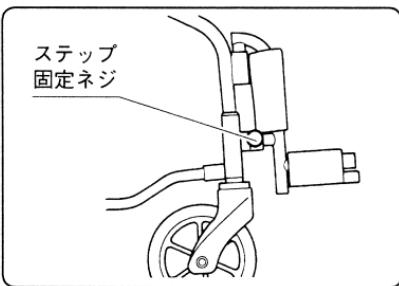


- 車いすを開く時に、シートを握って押し下げないでください。  
手を挟み危険です。

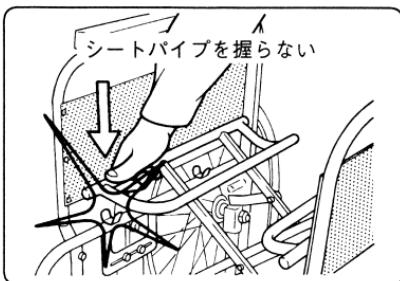


# 1.各部の名称

〈自操型〉

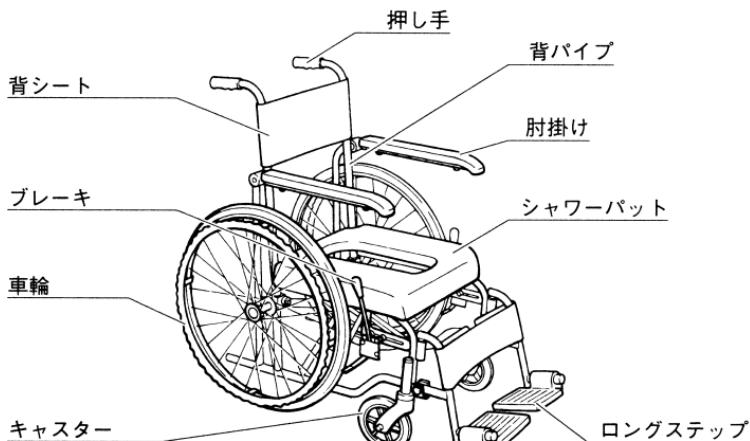


〈介助型〉

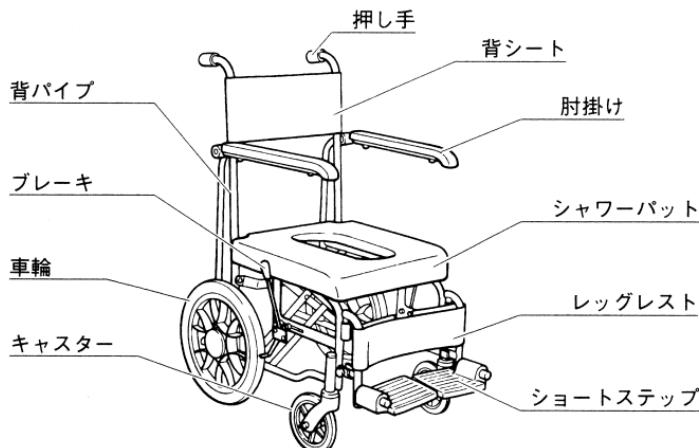

※ 介助型にはオプションとしてロングステップも用意されています。


## 2.開きかた

- ① 車いすのブレーキを両輪にかけておきます。

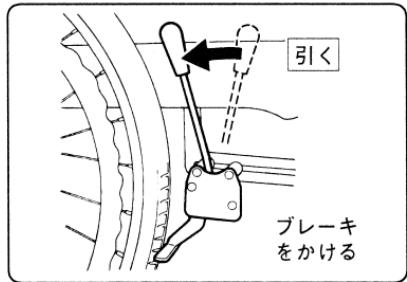


- ② 押し手を持って軽く左右に開きます。  
③ 片側の車輪を少し浮かせて、その状態を保持します。  
④ 車輪を浮かせてない側のシートパイプを手の平で押してゆっくり開きます。

②

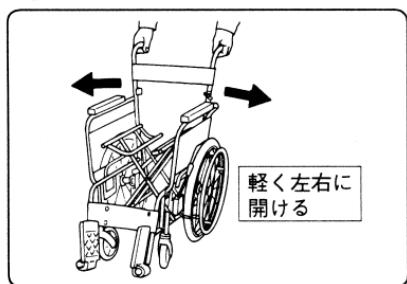

③④

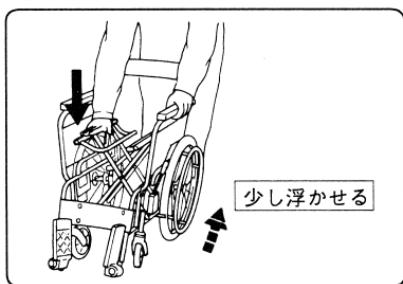

▲ 注意




シートパイプを握り、勢いよく開くとシートパイプに手が挟まるので、ゆっくりと開いてください。


### 3.シャワーパットの取り付け・取り外し

- ① 車いすのブレーキを両輪にかけておきます。
- ② 必要に応じて肘掛けを上げてください。
- ③ シャワーパットを図のように前から引っかけるようにし、背パイプに沿って下ろし取り付けます。シャワーパットを取り付けた後、ガタつきがないことを確認してください。

③

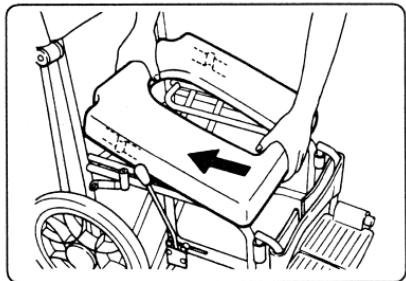

③

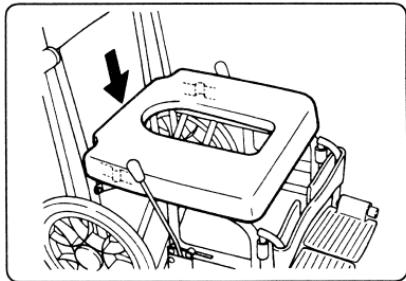


- シートの取り外しは上記と逆の要領で行ってください。

### 4.たたみかた


- ① 車いすのブレーキを両輪にかけておきます。
- ② ステップを両側とも上げます。
- ③ シートは取り外しておきます。(3.シャワーパットの取り付け・取り外しを参照)
- ④ シートパイプを持ち上げ、左右を少し寄せます。
- ⑤ 両側からアームレストをゆっくりと押させてたたみます。

**▲注意**車いすをたたむときは、アームレストを握らないでください。

②

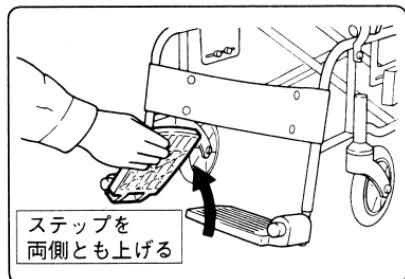


④⑤

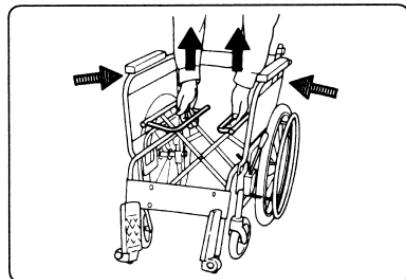

## 5.乗り降りの例

- ① 車いすのブレーキを両輪にかけておきます。  
**△警告**車いすが動きだし大変危険ですので必ずブレーキをかけてください。
- ② ステップを両方とも上げます。  
**△警告**危険ですのでステップの上に乗らないでください。
- ③ 車いすをしっかりと保持し、腰を浮かせゆっくり乗り移ります。
- ④ ステップを降ろし、両足をステップに乗せます。

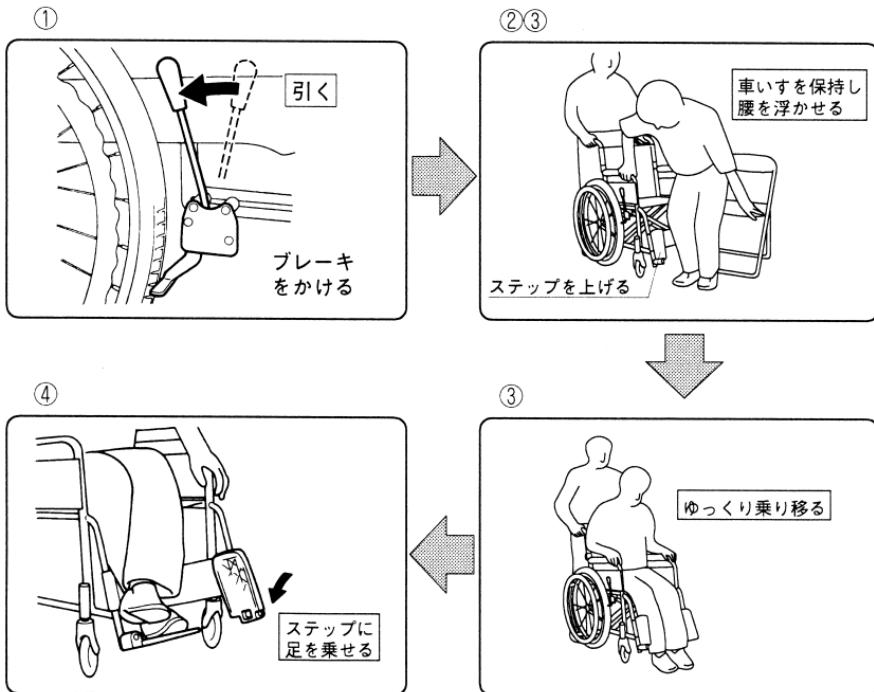



- 降りるときは上記と逆の要領で行ってください。

## 6. 日常車いすとして使用する場合

- 車いすとして日常使用する場合は、別売の『座バケット』と『オプション背シート』をご使用ください。また介助型車いすには、『ロングステップ』と『ショートステップ』が用意されています。

- 下記に座バケットの取り付けかたを示します。


- ① 車いすのブレーキを両輪にかけておきます。
- ② 座バケットの後部を持ち、座バケットの前部をシートパイプに密着させ、少し後の方から座バケット後部を背パイプに沿って降ろします。
- ③ 座バケットを前方へスライドさせ、ツメがシートパイプにはまるのを確認します。

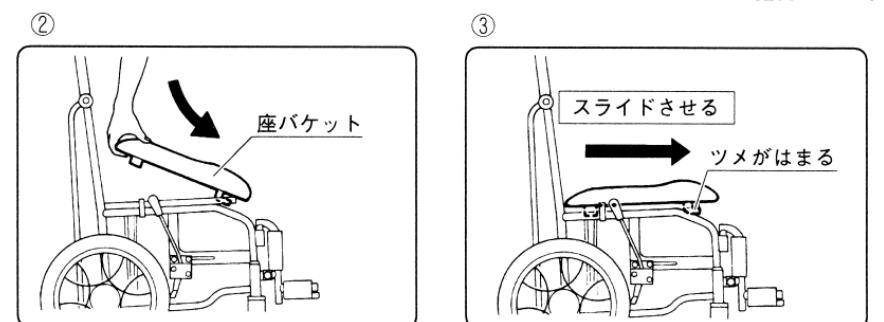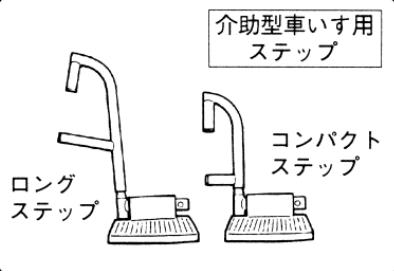

- 座バケットの取り外しは上記と逆の要領で行ってください。

- 下記にオプション背シートの取り付けかたを示します。

- ① オプション背シートは『短い方』が上にくるように取り付けます。
- ② オプション背シートのマジックテープをしっかりと止めて下さい。

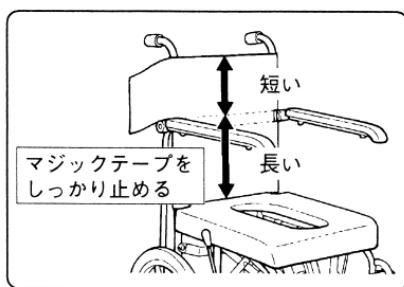

## 7.浴室での使用について


### ⚠ 注意

- 使用後は本製品についた水をよく拭きとってください。

水がついたままにしておくと走行時に危険なだけではなく、保管の状態としても良くありません。

- シャワーパットを浴槽等水の中へ入れないでください。

シャワーパット内に水が浸透してしまい、水が抜けなくなります。

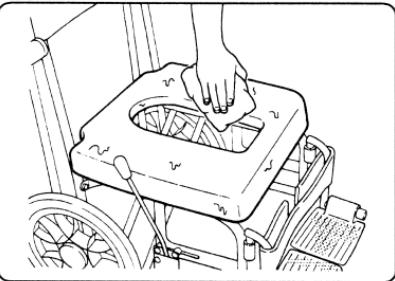


## 8.保守・点検

- 乗車前には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態で使用をしてください。
- 修理・調整は必ず販売店へ依頼してください。


- ① キャスター・車輪・ブレーキ等のゆるみを点検し、ゆるんでいるときは増し締めをしてください。
- ② ブレーキの効き具合が悪いときは、販売店へ調整の依頼をしてください。
- ③ 車いすは湿気に弱いので水のかかる場所に放置しないでください。
- ④ 足の長さに合わせてステップの高さを調整してください。

⑥

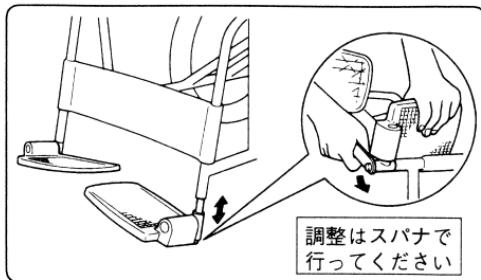


## 9.走行場所

- 車いすは歩行者として扱われます。車道を通らず、必ず歩道を通ってください。
- 溝や踏切の線路による落輪、歩道の段差での転落には充分注意してください。

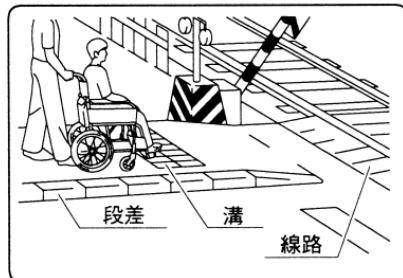

## 10.段の上がりかた

- ① 足元の『テッピングレバー』を押し出し、『押し手』を手前に引くようにしてキャスターを段の上にあげてください。
- ② 後車輪を段に突き当て、車いすを押しながら『押し手』を持ち上げてください。

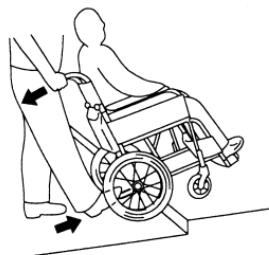

## 留 意

- 車いすのフレームの耐用年数は5年を基本にして製作されています。
- 4年経過後使用される場合は、必ず販売店へご相談ください。

# 保証書

1. 保証期間はお買上げ後1ヶ年です。
2. 取扱説明書に基いた正常な使用状態で異常や故障が発生した場合、保証期間内に限り無償修理をいたします。ただしタイヤキャスターの摩耗やパンク、シートの破れ等は除きます。
3. 次の場合は保証期間中でも有償修理といたします。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理改造による故障  
(ロ) 天災地変などによる故障  
(ハ) 保証書に販売店の押印のない場合

4. 故障の場合は販売店へご連絡ください。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This guarantee is valid only within Japan.
6. この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 **Miki** 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号  
TEL 052(694)0333

ご住所	TEL	販売店
お名前	住 所	店 名
お買上げ日	平成 年 月 日	TEL

印