


# 取扱説明書

## アイスケイン・アタッチメント

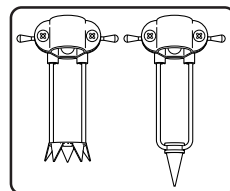

はじめに ご使用前に本書を必ずお読み頂き確実に理解して下さい。そして適切な取り扱いと保守をして下さい。また本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管して下さい。

### ⚠ 危険 【死亡または重傷を招くもの】



- 先端のスパイク部分を振り回して自分の足や、周りの人、物等にぶつけないで下さい。人通りの多い場所は特に注意し、常に周囲の安全を確認してご使用下さい。

### ⚠ 警告 【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 本製品は雪や氷結で路面が滑りやすくなっている時、杖の滑りを抑えるために杖先に取り付けてご使用下さい。
- ご使用前には必ず点検をして下さい。(保守・点検参照)


### ⚠ 注意 【軽傷または物的損害を招くもの】

- 杖の滑り止め以外の用途には使用しないで下さい。
- 室内では使用しないで下さい。床を傷つけます。
- 取り付け、ハネ上げ時等、アイスケイン・アタッチメントに触れる時は手袋等をして下さい。突起が鋭いためケガをします。

## 取り付け方法


**⚠ 警告** 取り付けは必ず販売店へ依頼して下さい。

### ① ネジを外し杖をはさむ

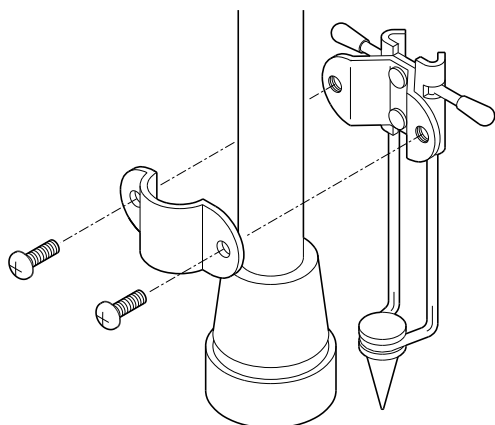

### ② 杖先にネジで堅固に固定する

杖をつく時に外側になるようにする

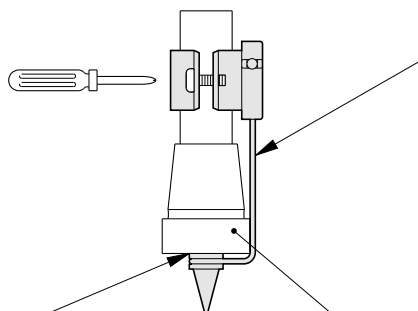


杖先ゴムは付けたままで

隙間なく付ける


※ 本製品には2種類の長さのネジが付属されています。

杖の太さに応じて、適当な長さのネジを選択し取り付けして下さい。

付属ネジ  
(各2本)

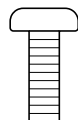

M4×12

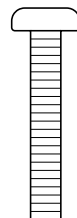


M4×24


## 使用方法

- アイスケイン・アタッチメントが必要ない場所では上にハネ上げておきます。

—使用時—



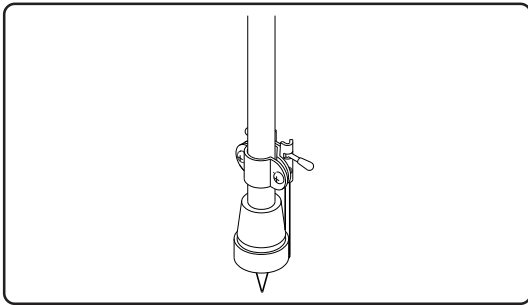


—非使用時—

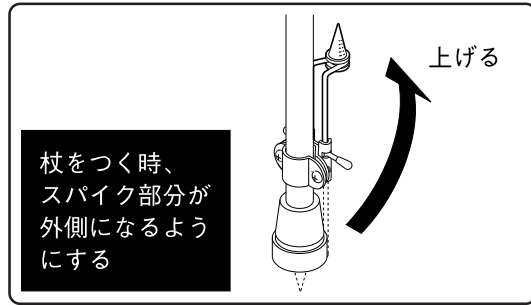

### ハネ上げの方法

- ① 白キャップのレバーを両側から内側に押し込みます。
- ② 白キャップのレバーを押し込んだまま、スパイク付き金具をゆっくりと上げます。
- ③ 白キャップのレバーが元に戻って確実にロックされたことを確認します。

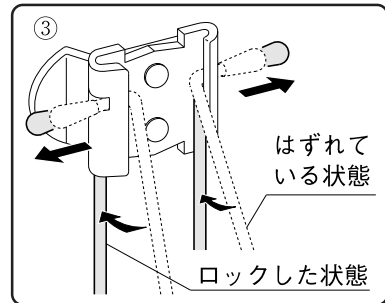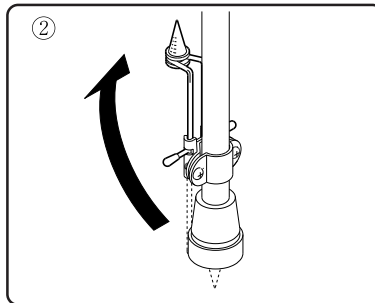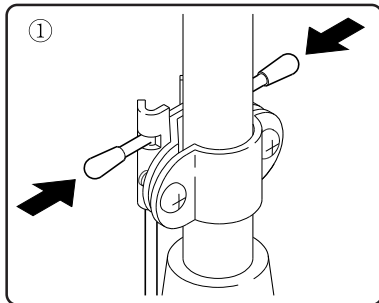

- ▲ 警告** スパイク部分でケガをしますので、手袋等をして作業を行ってください。  
また周囲の人や物等に傷を与えないようによく確認をして下さい。

## 保守・点検

- 取り付けネジを点検し、緩んでいる時は増し締めをして下さい。
- 各部のヒビやガタつきを点検し、不具合がある時は使用を中止し販売店までご相談下さい。

## 保管

- 使用後は雪や汚れをよく拭き取って、室内で通風の良い日陰に保管して下さい。
- 長期間ご使用にならない時は杖から取り外して下さい。

## 車いす保証書

1. 保証期間はご購入後1か月です。
2. 保証期間中「正常な使用状態」において「製造上の欠陥」による故障については無償修理をいたします。ただしタイヤキャスターの摩耗やパンク、シートの破れ等は除きます。
3. 次の場合は保証期間中でも有償修理といたします。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理改造による故障  
(ロ) 天災地変などによる故障  
(ハ) 保証書に販売店の押印のない場合
4. 故障の場合は販売店または弊社へご連絡ください。  
This guarantee is valid only within japan



ご住所 〒 TEL	販売店
お名前	住所
殿	店名
お買上げ日 平成 年 月 日	TEL