




UX型バスベンチ組立説明書 《背なしタイプ》

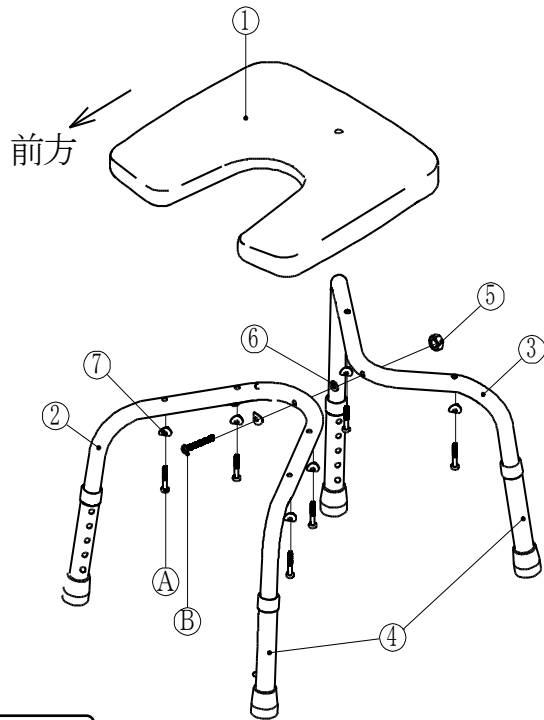

構成部品

- ①座面 ×1
- ②脚パイプ(前方) ×1
- ③脚パイプ(後方) ×1
- ④脚調節パイプ ×4
- ⑤六角ナット ×1
- ⑥プラスチックリング ×1
- ⑦波型ワッシャー ×7

ねじ

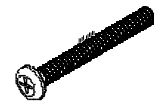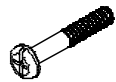

6本


1本

注意

- ご使用前に毎回ネジの緩みがないか確認してください。緩んでいる場合はドライバーでしっかり締めてください。緩んだままで使用しますと不安定になり、転倒する危険性があります。
- 当製品は、水中での使用に向きません。水中では浮上り不安定になります。必ずバスタブ等の外で使用してください。
- 使用していく中でバスベンチの足部に取付けてあるゴムチップが劣化することが懸念されます。転倒の原因にもなりますので早めに交換してください。
- 床面に固定する場合は、別売りの吸盤をお買い求めください。
- 当品を火にかけたり、あぶったりしないでください。素材が溶けて火傷の危険があります。
- 直射日光や高熱に長い時間放置しますと変形することがあります。
- 高さ調節のノッチボタンは、確実に穴にはまっていることを確認してからお座りください。ボタンがずれたまま座りますと、座が急激に下がって転倒することがあります。


組立時の注意点

- ねじを固定する際は、まずは緩めに締め(仮止め)、一通り組み終えてから固く締めてください。最初から固く締めていきますとパイプ等が変形し組立が出来なくなることがあります。
- 座面には前後があります注意してください。上記図参照。

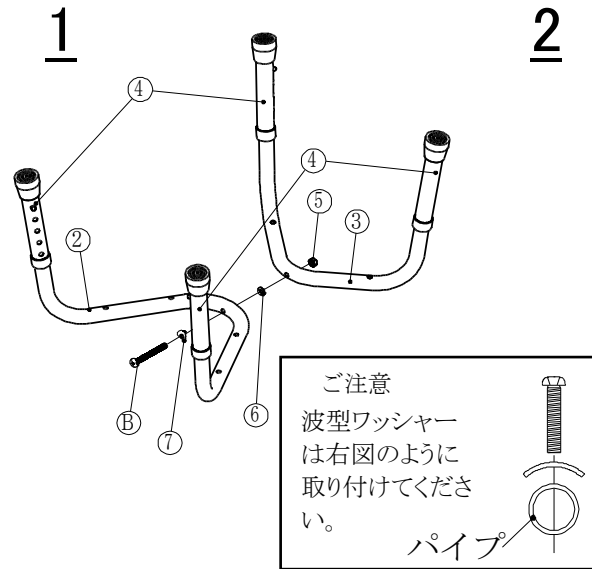


波型ワッシャーを挟みねじを固定してください。波型ワッシャーはパイプの曲線に沿わせてください。

3

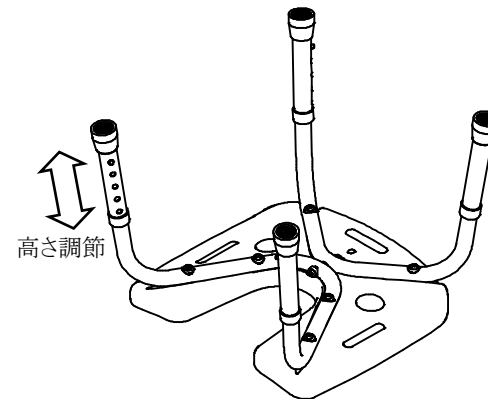


必要に応じて脚調節パイプの高さを調節してください。その際は、4本共同じ高さになるようにしてください。脚パイプの固定用ピンと脚調節パイプの固定用穴を合わせてください。

2

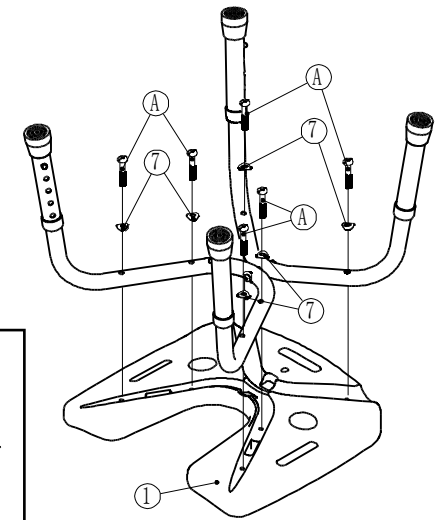

手順1と同様にねじを固定してください。6箇所すべて固定してください。

4

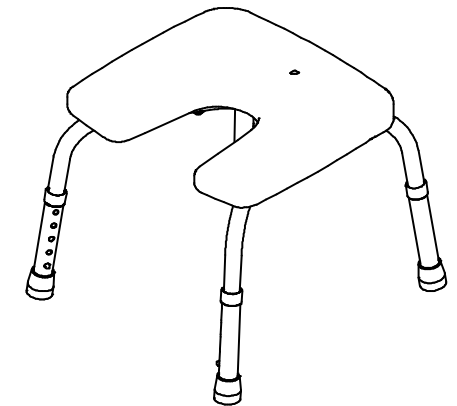

完成。
座った状態で4点接地しているのを確認してください。