

# NOVA\_e

JWX-1取付の場合：簡易形自操用電動車いす 122308 (JIS T0102)


JW-II取付の場合：パワーアシスト形自操用手動車いす 122212 (JIS T0102)

## 補足取扱説明書


ご使用前に、本書と別冊「標準車いす取扱説明書」、さらにご購入いただいた車いすの仕様に応じて電動ユニットJWX-1もしくはJW-IIの「取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管し、利用者の身体の状態・環境の変化に応じて再読してください。

### 車いすのたたみかた


- 1 駐車用ブレーキのレバーを引いて、両輪のブレーキをかけます。

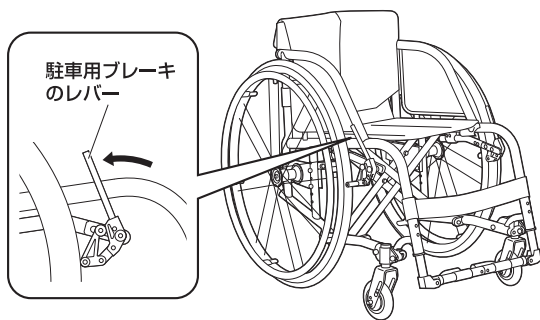


- 2 セパレートステップ装着車の場合、両側のフットサポートをはね上げます。

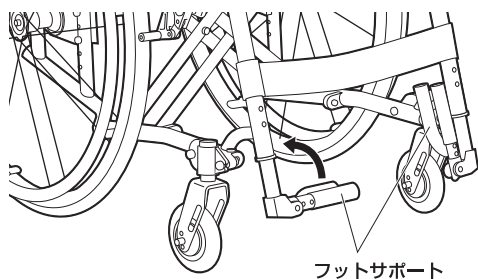


- 3 テンションバーの中央を持ち上げ、軽く曲げておきます。

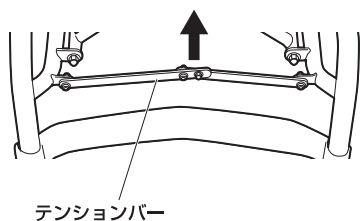

- 4 座シートの前端を持ち上げ、シートパイプを引き寄せます。

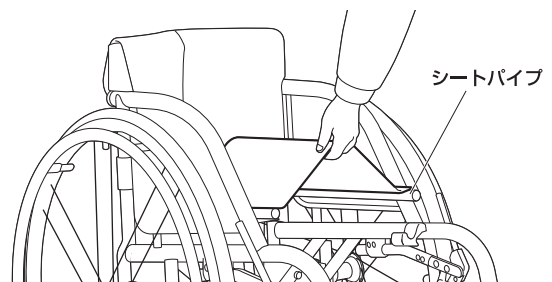

- 5 アームサポートフレームを両側から押し、座シートを折りたたみます。

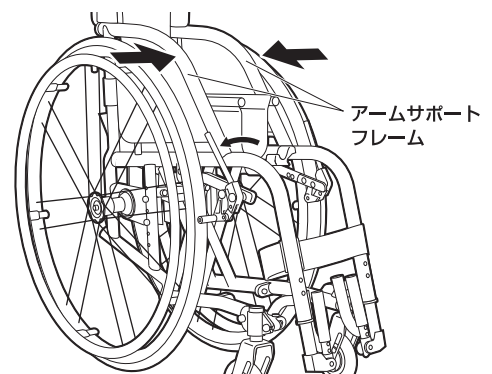

## フットサポートの高さ調節

## 駐車用ブレーキの調節

製造元

株式会社 ミ キ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号  
TEL 052-694-0333 FAX 0