

## 補足取扱説明書

ご使用前に本書と別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体の状態・環境の変化に合わせて、必要なときに本書をお読みください。

### 組み立て、折りたたみ方

#### ⚠注意


- ・作業は、平坦な場所でおこなってください。
- ・作業は、必ずロックプレートがロックの状態でおこなってください。解除の状態で作業をすすめると座面部が急にさがり危険です。
- ・折りたたみ時は、バックサポートを起こした状態(別冊P8 バックサポートの角度を変える参照)で作業してください。
- ・折りたたみ時は、手押しハンドルを下げた状態(別冊P12 手押しハンドルの高さ/向き調節参照)でおこなってください。

#### 【組み立てかた】

##### 1. 両輪の駐車用ブレーキをかけてください。

(別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」P7 駐車用ブレーキのかけかた参照)  
ロックプレート(黄色)がロックされた状態であることを確認してください。  
※解除の状態で作業をすすめると座面が急にさがり危険です。

- ①ヘッドサポートフレーム ※写真は旧仕様になります。
- ②インナーベルト
- ③ヘッドサポートシート
- ④フット・レッグサポート

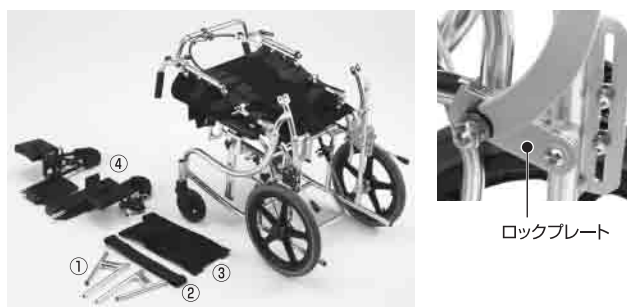

##### 2. 両側のリクライニング支点部Aに取りついているシャフト先端のロックピンを樹脂部ごと引き抜いて外し、シャフトを抜き取ります。


※外した部品は、再度使用しますので無くさないように注意してください。



##### 3. バックサポートを引き上げ、両側のリクライニング支点部Bとリクライニング支点部Aの穴をあわせ、シャフトを内側から差し込みます。


シャフト先端の穴にロックピンを差し込みます。

※支点部Aにカラーが付いていることを確認してください。

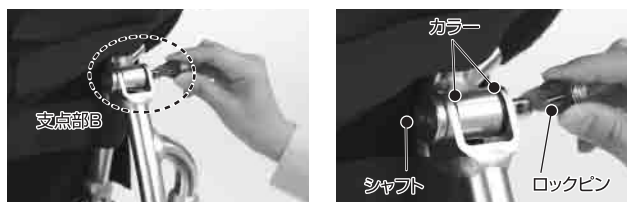

##### 4. 押手の高さ/向きを調節してください。


(別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」P12 手押しハンドルの高さ/向き調節参照)

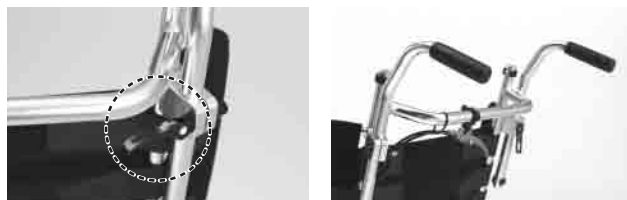

**5. ヘッドサポートフレームを取付ます。**

(別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」P12 ヘッドサポートの高さ調節参照)

※写真は旧仕様になります。

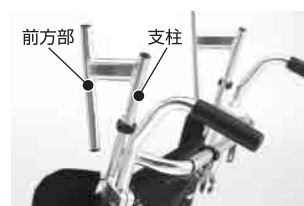**6. ①インナーベルトをヘッドサポートフレーム後方支柱に巻くようにとりつけます。インナーベルトとインナーシートを貼り合わせます。**

②ヘッドサポートシートをヘッドサポートフレーム前方部にとりつけます。

**7. 両側のアームサポート引き上げてください。**

(別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」P13 アームサポートの高さ調節参照)

**8. 両側のフット・レッグサポートを取り付けてください。**

(別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」P11 フット・レッグサポートの開閉・取り外し参照)

**9. 両側のロックプレートを引き上げ解除の状態にします。**

通常使用時はロックプレートを解除の状態でご使用ください。リクライニング機能が正常に作動しません。

※折りたたみ・組み立て時はロックプレートをロックの状態で行なってください。

**● 組み立て完成 — クッション、パッドを取り付けてください。**

(別冊「NEXTROLLER\_sp取扱説明書」P6 専用クッションとパッドの取り付け位置を参照)

**【折りたたみかた】**

・折りたたみは組み立てと逆の手順になります。

製造元

Wheel Chair  
**Miki**

株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

