

## 車軸位置高さ調整用ボンベ架

この度は、ボンベ架をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱ってください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。


### 取扱説明書

#### 注意・警告

- ・ボンベ以外での使用はしないでください。
- ・ボンベを載せる際はボンベ架がしっかり固定されていることを確認してから載せてください。
- ・ボンベ架とその他のオプションを併用取り付けされる場合、可能であればボンベ架以外のオプションは前方対角線にお取付ください。後方に並べて取付けた場合はボンベを設置した際に後方に転倒する危険性がありますのでご注意ください。また、移乗の際は、注意しご利用ください。
- ・ボンベを載せる場合は、手押しハンドルやバックサポートのポケット等後方に荷重が掛からないようご利用ください。
- ・弊社車いすに他社製のオプションは対応しておりません。使用しないでください。

#### 梱包内容

- 専用ステー
- 車軸ナット
- 車軸スプリングワッシャー
- 車軸ワッシャー
- 鉄六角ボルト  
UNF 1/2 L=50.8
- ノブボルト

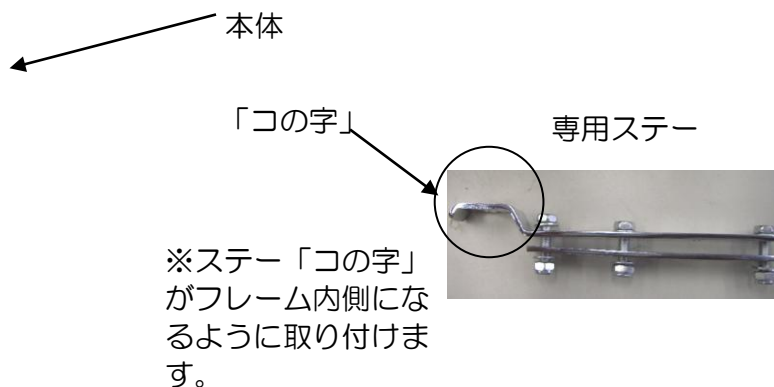

#### 組み付け方法

##### 〈介助型と車軸クイックリリース型〉




① ボンベ架をティッピングバーに差し込みます。



② 可能な限り最上部の車軸穴位置にボルトで位置決めし



③ ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順で、19mmのスパナを用い締め付けます。

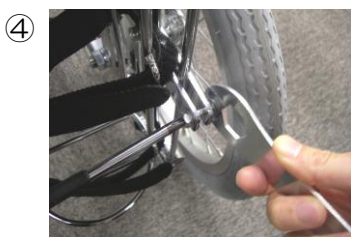

④ ガタがないようプラスチックカバーと10mmスパナにて




⑤ ノブボルトを締めます。



⑥ 完成。

##### 〈自走型〉

車軸同軸上でステー取付。

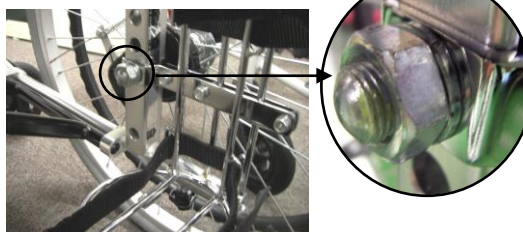

車軸同軸ステー

車軸ワッシャーを外し、車軸スプリングワッシャーと車軸ナットで締めます。