


四点杖入れ


取扱説明書

- ① 四点杖本体セット
(右に詳細示す)
- ② タイラップ
- ③ 固定用バンド

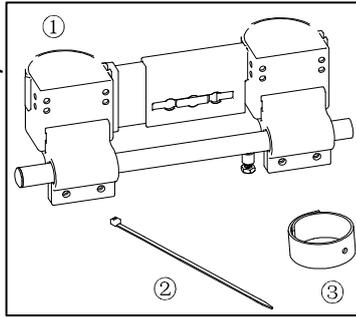


四点杖入れ一式

- ① 本体カップ×2
- ② クランプ(ボルト付)×2
- ③ 調節ステー(3段階)
- ④ 延長テッピングバー

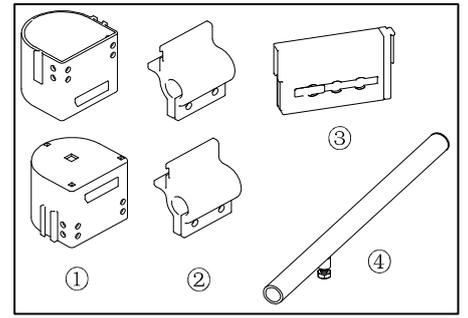


四点杖本体セット 詳細


組み付け方法

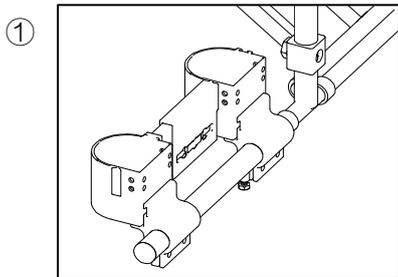

① 四点杖入れを本体カップが上を向くようにテッピングバーに差込みます。出来る限り奥まで差し込みます。

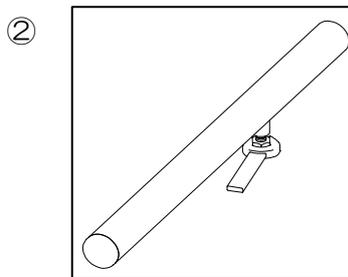


② 延長テッピングバーの付いている固定用ボルト(六角M6×20)を下に向け10mmスパナで締めて延長テッピングバーが動かないよう固定します。

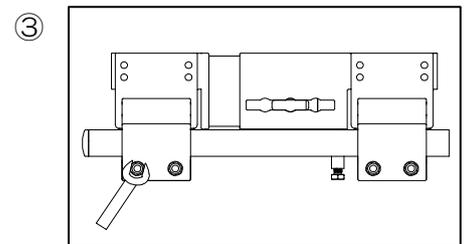


③ 本体カップが垂直になるよう調節し、10mmスパナで2箇所ボルトを締め、クランプを固定します。締付トルクは2.0N・mです。目安としては、自重で倒れない程度です。

④ 注 クランプの六角穴にボルトの頭をハメ、反対側のナットを締めてください。

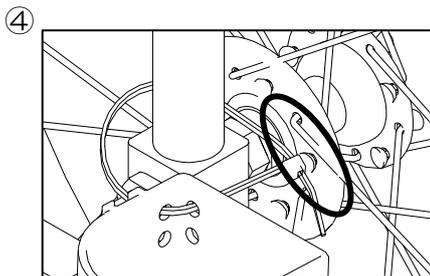


④ タイラップで杖入れを固定します。タイラップは締めていくと余分な箇所(図、まる)ができますので、その余分な箇所をカットします。

⑤ 注 カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。

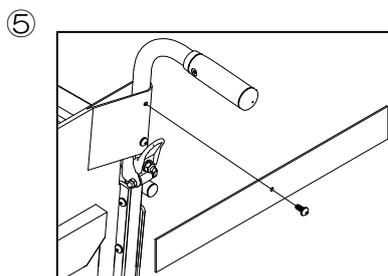

⑤ 背シート最上部のビスをドライバーで一旦はずします。ビスを固定バンドの穴に通し、固定バンドを挟む様に再度取り付け、固定バンドを固定します。


⑥ 注 背フレームのネジ山に合わせてゆっくり締めてください。ネジ山をつぶす恐れがあります。

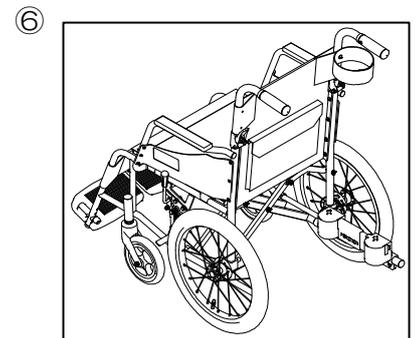


完成。

四点杖入れ 左右交換(参考)

- ①本体カップ×2
- ②クランプ(ボルト付)×2
- ③調節ステー(3段階)
- ④延長テッピングバー

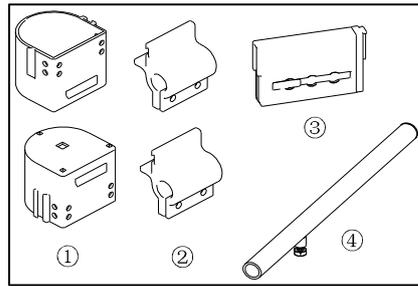


四点杖本体セット 詳細

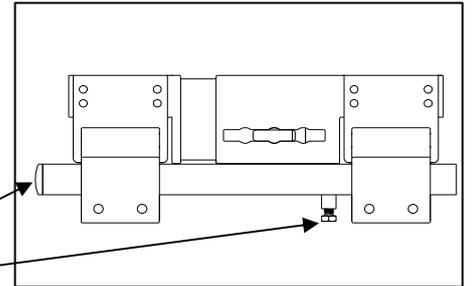


四点杖本体セット(右側用)


組み換え方法

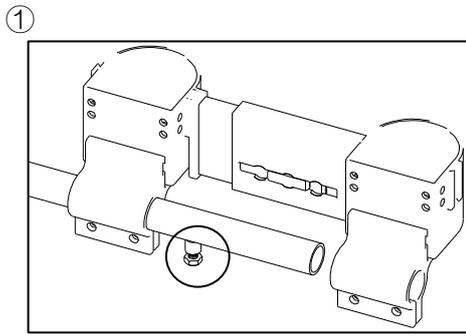


① 固定用ボルト(図、まる)側からパイプをクランプから抜き取ります。

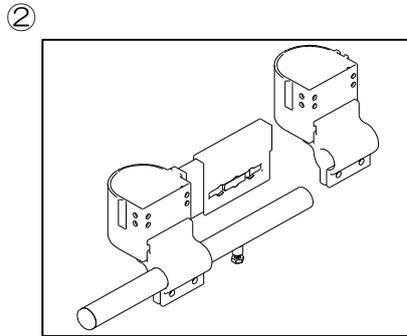


② パイプを抜いたクランプを調節ステーから外します。

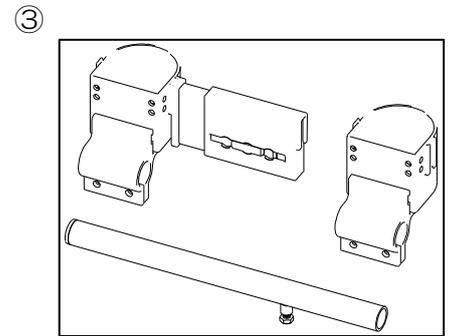


③ パイプをもう片方のクランプから抜き取ります。

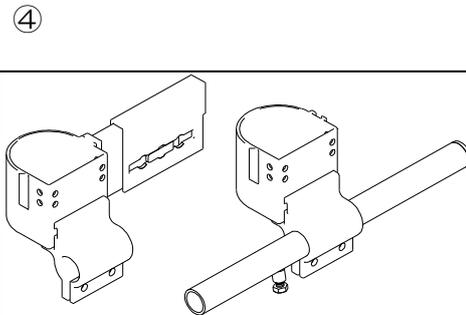

④ ②で外したクランプに反対のエンドキャップ側から差し込みます。出来る限り差し込んでください。

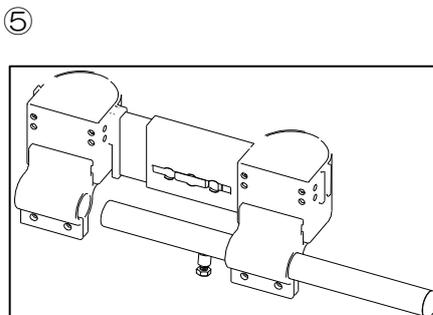

⑤ ④でパイプを差し込んだクランプを調節ステーに取り付けます。

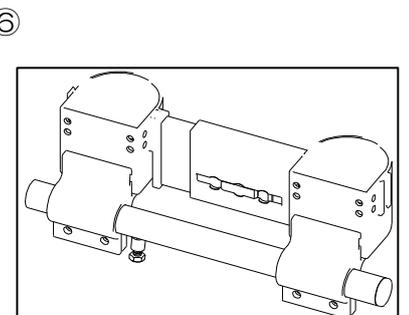

⑥ パイプを反対側のクランプに差し込んで、左側用完成です。