

MS-0020 NRテーブル取付け

取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。


※本製品の取付けにはMS-151 テーブル(大)スライドタイプが必要となります。

MS-151 テーブル(大)スライドタイプ一式をご用意いただき、取扱説明書もあわせてお読みください。

はじめにご確認ください

本製品ご購入後にはじめて梱包箱をあけるときに、下記の部品がすべて入っていることを確認してください。

	品名	数量
①	NRテーブル取付け用部品(NXR-OPT-TAP-002)	2
②	テーブル横差し受金具	2
③	・M5*20ボタンキャップボルト(ユニクロ)	2
	・M5用平ワッシャー(ユニクロ)	2
	・M5用スプリングワッシャー(ユニクロ)	2
	・M5*45ボタンキャップボルト(BC)	1
	・φ17.5 t2用エンドキャップ	2

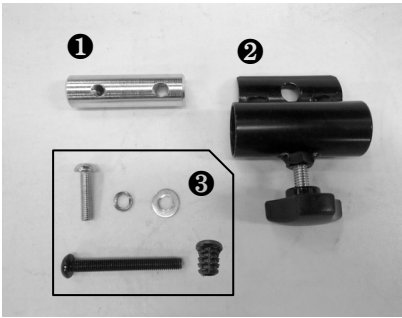

注意・警告

- ・ご使用の際は、テーブル、アームサポートにがたつきが無い事を確認してください。
- ・本製品の車いすへの取付け、テーブル本体の着脱等の作業は、必ず駐車用ブレーキをかけ平坦な場所で行い、指等をはさみ込まないように注意してください。
- ・車いす使用者の乗り降りの際は、その都度テーブル本体の着脱を行ってください。
- ・テーブル本体部が、本体後端より半分以上両側のアームサポートに載っていない状態で使用しないでください。テーブル本体が突然倒れるなど、けがをする恐れがあり大変危険です。
- ・各調節を行う際は、取り付いている締結部品をなくさないようにしてください。また、調節後は、必ずがたつきの確認をしてください。がたつきのある状態で使用しないでください。
- ・テーブル本体を取り付けたまま、車いすをたたまないでください。
- ・テーブル本体前端上には、重い物を載せたり手をついたりしないでください。テーブルが外れ、けがをする恐れがあります。
- ・暖房器具に近づけたり、シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。




作業手順

※以下は右側の作業のみの説明となります。左側も同様に行ってください。*****

〔使用工具〕 ・3mm 六角レンチ ・プラスドライバー


1.NRテーブル取付用部品をアームサポートフレームへ挿入する

- ①アームサポートフレーム前方のエンドキャップを外します。
- ②アームサポート前方を固定しているボタンキャップボルトを3mm六角レンチで外します。
【ボタンキャップボルトの30mm前方のビス】(写真A)をプラスドライバーで外します。
- ③【NRテーブル取付け用部品】(写真B)にM5*45ボルトを手締めで取付け、アームサポートフレーム前方から挿入します(写真C)。
- ④挿入後、取付け用部品のネジ穴とアームサポートフレームの穴を合わせます。(写真D)

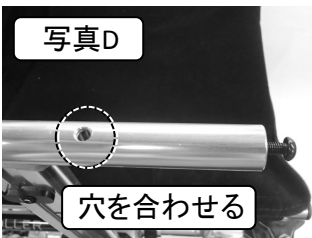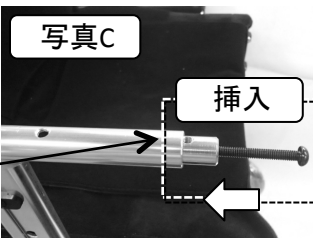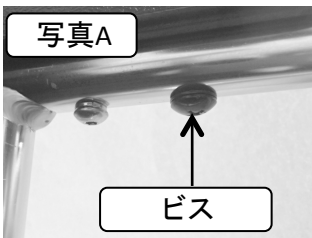


2.テーブル横差し受金具を取付ける

- ①1.で外したボタンキャップボルトを使い、アームサポートと取付け用部品を共締めします(写真E)(締め付けトルク:2.0[Nm])。
- ②スプリングワッシャーと平ワッシャーを組み込んだM5*20ボタンキャップボルトを使い、【横差し受金具】をアームサポートフレームへ取付けます。(締め付けトルク:4.0[Nm])
- ③M5*45ボルトを取り外し(写真F)、アームサポートフレーム前方へエンドキャップを取付けます(写真G)。

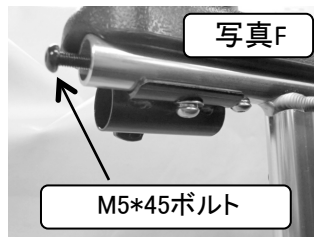

3.テーブルを取付ける

- ・1.2.と同様の作業を左側も行い【横差し受金具】を取付けたのち、車いすへテーブルを取付けて完成です。
- ※M5*45ボルトは、取付け時にのみ使用します。最終的な車いすやテーブルへの組付けは行いません。

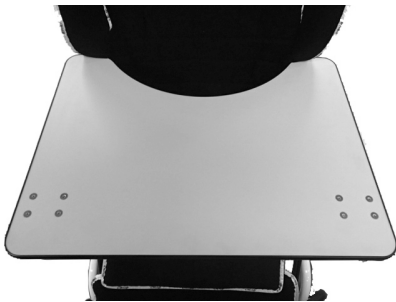

※テーブルの車いすへの取付け手順は、『MS-151テーブル(大)スライドタイプ取扱説明書』をご確認ください。