

キャストのメンテナンス


本製品はキャストの車輪を工具を使用することなく取り外すことができます。
車軸にからまった異物を取り除く際に便利です。

● 車輪の外しかた


1 両輪の駐車用ブレーキをかけます。

2 車いすを後方に倒します。

*まわりに人や障害物がないことを確認して、ゆっくり動かしてください。

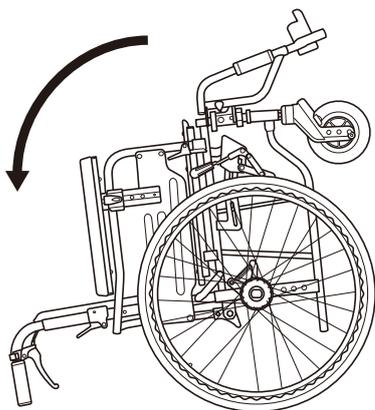


3 キャスタフォークの固定ロッドを両側から指ではさみ、矢印の方向に動かしてロックを解除します。

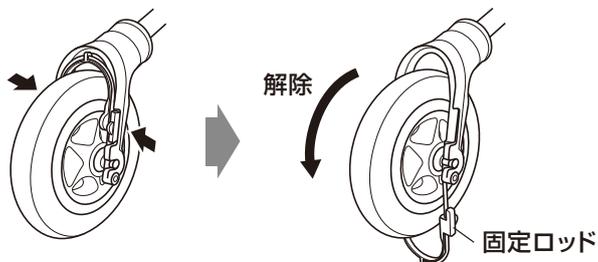


4 車輪を上引っ張って、車輪を外します。

*キャストフォークや車輪の軸に異物があるときは、この時点で取り除いてください。

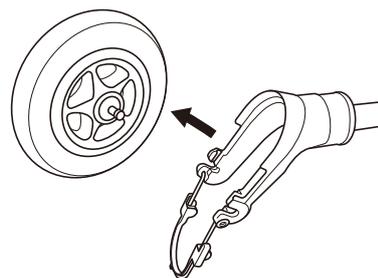


● 車輪のとりつけかた

1 キャスタフォークの溝に、車輪を挿入します。

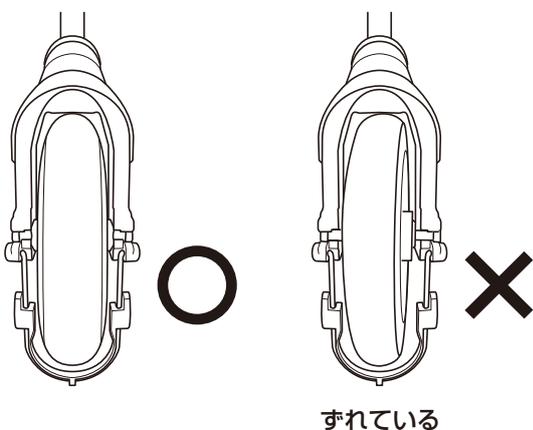

2 固定ロッドをもとの位置に戻してロックします。

*固定ロッドを軽く動かして、確実に固定されたことを確認してください。

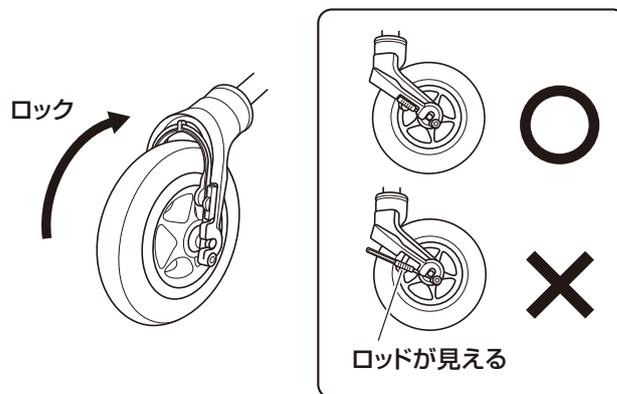

3 車いすを元の位置に戻します。

製造元

Wheel Chair
Miki

株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号