

キャスタのメンテナンス


本製品はキャスタの車輪を工具を使用することなく取り外すことができます。
車軸にからまった異物を取り除く際に便利です。

● 車輪の外しかた


1 両輪の駐車用ブレーキをかけます。

2 車いすを後方に倒します。

*まわりに人や障害物がないことを確認して、
ゆっくり動かしてください。

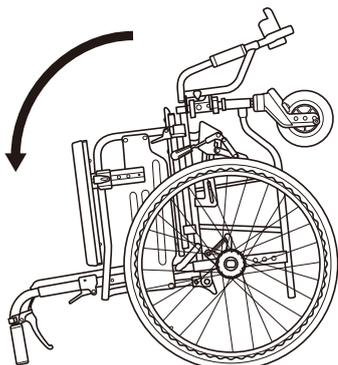


3 キャスタフォークの固定ロッドを両側から指ではさみ、矢印の方向に動かしてロックを解除します。

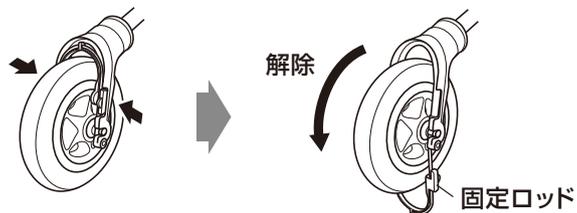

4 車輪を上引っ張って、車輪を外します。


*キャスタフォークや車輪の軸に異物があるときは、
この時点で取り除いてください。

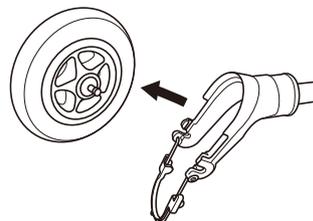

● 車輪の取り付けかた

⚠危険


「座面の高さ調節」が可能な機種は、車輪を取り付ける際、設定した座面の高さを必ず守ってください。
高さを誤ると、腰掛けた場合に転倒する恐れがあります。

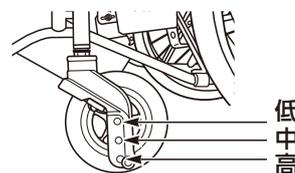

1 キャスタフォークの溝に、車輪を挿入します。


車輪の軸が、キャスタフォークの溝へ確実に奥まで入っていることを確認してください。

⚠警告

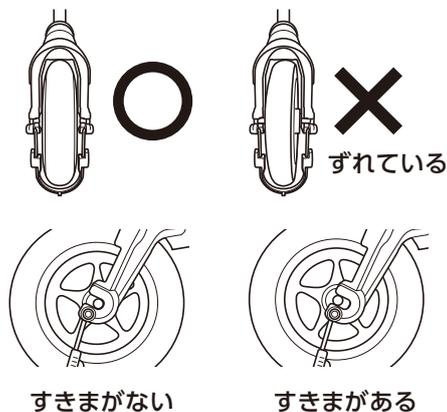

2 固定ロッドをもとの位置に戻してロックします。

*車輪を軽く動かして、固定ロッドで確実に固定されていることを確認してください。

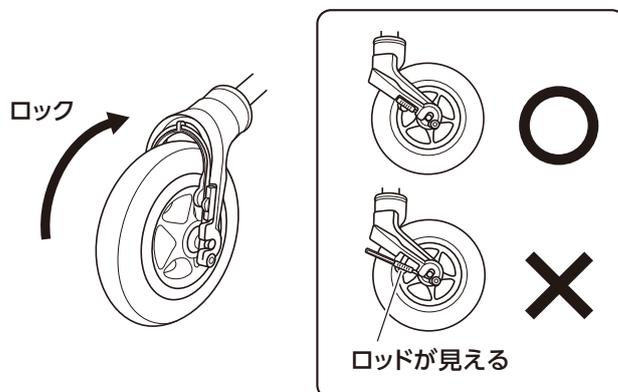

3 車いすを元の位置に戻します。

製造元

Wheel Chair
Miki

株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号