

機種名		機種名	
CRT-0		CRT-0	
フレーム材料	アルミ	駆動輪(主輪)径 (inch)	22×1
シート材料	ポリエステル PVC	適正空気圧 (kpa)	700
アームサポートタイプ	固定式	キャスト径 (inch)	6ソフトフォーミング
アームサポート	ウレタン	前座高 (mm)	435
サイドガード	ポリプロピレン	後座高 (mm)	410
グリップ	PVC	シート奥行 (mm)	380
バックサポート	スリングシート	シート幅 (mm)(※1)	400 (360)
背折れ	あり	バックサポート高 (mm)	400
フット・レッグサポート タイプ	固定式	フットサポート・ シート間距離 (mm)	340/360/380
フットサポート	軽量	アームサポート高 (mm)	245
キャスト	ソフトフォーミング	全高 (mm)	880
タイヤ	エアータイヤ	全幅 (mm)	540
制動用ブレーキ	サーボブレーキ	全長 (mm)	980
ハンドリム	アルミハンドリム	折りたたみ全高 (mm)	705
駐車用ブレーキ	SKブレーキ	折りたたみ全幅 (mm)	310
		折りたたみ全長 (mm) (※2)	930
		重量 (kg)	8.9

(※1)( )内は座シート寸法。  
(※2)( )内はスイングアウト  
取り付け時の寸法。

静的安定性試験方法 (弊社ではJIS T9201 10.1.2a方法によって試験を行っています。)

キャストが交換可能な場合、推奨するキャスト径は上記キャスト径になります。駆動輪・主輪のボルトとナットは、インチねじ (UNF 1/2-20山) 仕様になります。

## アフターサービス

- ・ 万一故障の場合は、お買い上げの販売店、または弊社へこの商品の品名および故障状況をご連絡ください。
- ・ 保証期間内の場合は、保証書の提示が必要となります。

## 保証

- ・ 保証内容につきましては、同封の保証書をご覧ください。
- ・ 保証期間終了後の修理については、お買い上げの販売店、または弊社へお申しつけください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有償修理いたします。

車いすの廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。

製造元

Wheel Chair  
**Miki**  
株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

## 車いす / CRTシリーズ

## 取扱説明書

CRT-1/2/3/4/5/6/7/8/1Lo/2Lo/3Lo/4Lo/5Lo/6Lo/7Lo/8Lo/0


より快適に車いすをお使いいただくために

### はじめに

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。  
本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体の状態・環境の変化に合わせて、必要なときに本書をお読みください。

### 目次

使用目的・特徴	2
はじめにご確認ください	2
安全上のご注意	2
各部のなまえ	6
使いかた	7
ブレーキのかけかた	7
車いすの開きかた / たたみかた	8
シートの取り付け / 取り外し	9
乗り降りのしかた	11
アームサポートの跳ね上げ	12
フット・レッグサポートの開閉・取り外し	12
各部の調節のしかた	13
フットサポートの高さ調節	13
使用上のご注意	14
困った時には	16
仕 様	17
アフターサービス	裏表紙
保証	裏表紙

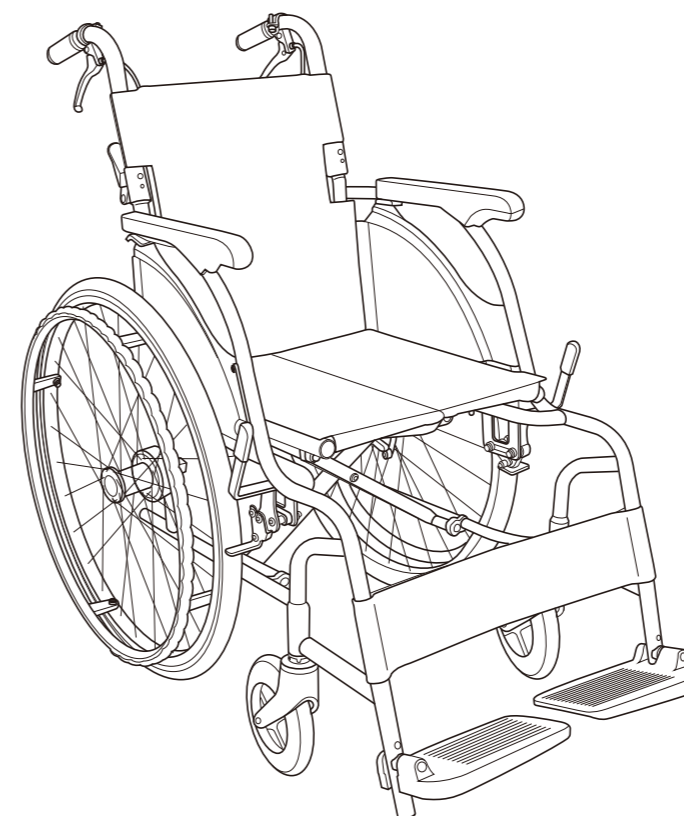

※本書で使用しているイラストは、ご購入いただいた製品と異なる場合があります。

















# 困った時には

車いすをご使用されていて「故障かな」と思われましたら、販売店へ連絡するまえに下記項目を確認してください。

症状	確認点	対処
車いすがまっすぐ走らない。 斜行する。	路面が傾斜していませんか。	低い方へ曲がらないように車いすを操作してください。 <b>〈自走の場合〉</b> 傾斜面の低い側に当たる駆動輪をより強く回してください。
	車いすは、傾斜面では低い方へキャストが流れる特性があります。	<b>〈介助者が押す場合〉</b> 傾斜面の低い側に当たる手押しハンドルに、より力を入れて押してください。
	駆動輪（主輪）の空気圧の不足、また左右の空気圧に差がありませんか。(※)	左右の駆動輪（主輪）を適正な空気圧に調整してください。
	キャストの回転に左右差がありませんか。 キャスト軸の回転がスムーズですか。	お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
駆動輪（主輪）の計4輪がきちんと接地していますか。	駆動輪（主輪）の空気圧は適正ですか。(※)	駆動輪（主輪）を適正な空気圧に調整してください。 適正空気圧はタイヤ側面に記載されています。
	駆動輪（主輪）のタイヤは摩耗していませんか。	お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
	駐車用ブレーキのタイヤ押えが駆動輪（主輪）にきちんと当たっていますか。	
	駐車用ブレーキがガタついていませんか。	
制動用ブレーキが効かない。	ワイヤーチューブが、折れ曲がったり、引っ掛かたりしていませんか。	インナーワイヤーがスムーズに動くように、ワイヤーチューブの取廻しを修正してください。 改善がみられない場合は、お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
	ワイヤーが伸びたり、切れたりしていませんか。	お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
駆動輪（主輪）に空気がはいらぬ、すぐにぬける。	適正な空気圧で補充してますか。(※)	駆動輪（主輪）を適正な空気圧に調整してください。 適正空気圧はタイヤ側面に記載されています。
	トップナット（コア押さえ、バルブナット、バルブスリーブ）が緩んでいませんか。(※)	締め付けてください。
	タイヤチューブのパンク、バルブの消耗はしていませんか。(※)	お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
異音がする。	本体や駆動輪（主輪）とオプション品、アクセサリなどとの干渉はしていませんか。	車いすに取り付けて使用するカバンなどは駆動輪（主輪）など回転する箇所と干渉しないようにしてご使用ください。
	可動部分の錆び・摩耗・汚れ・油汚れなどによっておこる摩耗音がしていませんか。	お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
	ボルト類の緩み等がおきていませんか。	
	フレームに歪みが発生していませんか。	
車いすが開かない。	背シートの張り具合を締めすぎていませんか。	背シートの張り具合を調整してください。

(※) エアータイヤの場合

(※※) CRT-5/6/7/8/5Lo/6Lo/7Lo/8Loの場合

# 仕様

		機種名			
		CRT-2	CRT-3	CRT-4	CRT-5
フレーム材料	アルミ				
シート材料	ポリエステル PVC				
アームサポートタイプ	固定式				
アームサポート	ウレタン				
サイドガード	ポリプロピレン				
グリップ	PVC				
バックサポート	スリングシート				
背折れ	あり				
フット・レッグサポートタイプ	固定式				
フットサポート	軽量				
キャスト	ソフトフォーミング				
タイヤ	エアータイヤ				
制動用ブレーキ	サーボブレー				
ハンドリム					
駐車用ブレーキ					

測定項目		機種名			
		CRT-2	CRT-3	CRT-4	CRT-5
駆動輪（主輪）径 (inch)					
適正空気圧 (kpa)					
キャスト径 (inch)					
前座高 (mm)					
後座高 (mm)					
シート奥行 (mm)					
シート幅 (mm)(※1)					
バックサポート高 (mm)					
フットサポート・シート間距離 (mm)					
アームサポート高 (mm)					
全高 (mm)					
全幅 (mm)					
全長 (mm)					
折りたたみ全高 (mm)					
折りたたみ全幅 (mm)					
折りたたみ全長 (mm) (※2)					
重量 (kg)					

	機種名				
	CRT-6	CRT-7	CRT-8	CRT-1Lo	CRT-2Lo
フレーム材料	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
シート材料	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC
アームサポートタイプ	固定式	開閉式 (ウイング)	開閉式 (ウイング)	固定式	固定式
アームサポート	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン
サイドガード	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
グリップ	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
バックサポート	スリングシート	スリングシート	スリングシート	スリングシート	スリングシート
背折れ	あり	あり	あり	あり	あり
フット・レッグサポート タイプ	固定式	開閉式 (スイングアウト)	開閉式 (スイングアウト)	固定式	固定式
フットサポート	軽量	軽量	軽量	軽量	軽量
キャスト	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング
タイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ	エアータイヤ	エアータイヤ
制動用ブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ
ハンドリム	なし	ブラハンドリム	なし	ブラハンドリム	なし
駐車用ブレーキ	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	SKブレーキ	SKブレーキ

測定項目	機種名				
	CRT-6	CRT-7	CRT-8	CRT-1Lo	CRT-2Lo
駆動輪(主輪)径 (inch)	14×1.5	22×1	14×1.5	22×1	14×1.5
適正空気圧 (kpa)	—	—	—	700	300
キャスト径 (inch)	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング
前座高 (mm)	435	435	435	400	400
後座高 (mm)	410	410	410	375	375
シート奥行 (mm)	380	380	380	380	380
シート幅 (mm)(※1)	400/420 (360/380)	400/420 (360/380)	400/420 (360/380)	400 (360)	400 (360)
バックサポート高 (mm)	400	400	400	400	400
フットサポート・ シート間距離 (mm)	340/360/380	340/360/380	340/360/380	300/320/340	300/320/340
アームサポート高 (mm)	245	245	245	245	245
全高 (mm)	880	880	880	845	845
全幅 (mm)	490/510	550/570	490/510	550	490
全長 (mm)	980	980	980	960	960
折りたたみ全高 (mm)	705	705	705	670	670
折りたたみ全幅 (mm)	250	320	250	320	250
折りたたみ全長 (mm) (※2)	850	690 (930)	640 (880)	920	840
重量 (kg)	9.1	11.2	10.5	9.4	7.9

(※1)( )内は座シート寸法。(※2)( )内はスイングアウト取り付け時の寸法。

	機種名					
	CRT-3Lo	CRT-4Lo	CRT-5Lo	CRT-6Lo	CRT-7Lo	CRT-8Lo
フレーム材料	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
シート材料	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC	ポリエステル PVC
開閉式 (ウイング)	開閉式 (ウイング)	開閉式 (ウイング)	固定式	固定式	開閉式 (ウイング)	開閉式 (ウイング)
ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン
ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
スリングシート	スリングシート	スリングシート	スリングシート	スリングシート	スリングシート	スリングシート
あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
開閉式 (スイングアウト)	開閉式 (スイングアウト)	固定式	固定式	開閉式 (スイングアウト)	開閉式 (スイングアウト)	
軽量	軽量	軽量	軽量	軽量	軽量	
ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	ソフトフォーミング	
エアータイヤ	エアータイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ	ハイポリマータイヤ	
サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	サーボブレーキ	
ブラハンドリム	なし	ブラハンドリム	なし	ブラハンドリム	なし	
SKブレーキ	SKブレーキ	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	ワンハンドブレーキ 伸縮延長レバー付き	

測定項目	機種名					
	CRT-3Lo	CRT-4Lo	CRT-5Lo	CRT-6Lo	CRT-7Lo	CRT-8Lo
駆動輪(主輪)径 (inch)	22×1	14×1.5	22×1	14×1.5	22×1	14×1.5
適正空気圧 (kpa)	700	300	—	—	—	—
キャスト径 (inch)	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング	6ソフトフォーミング
前座高 (mm)	400	400	400	400	400	400
後座高 (mm)	375	375	375	375	375	375
シート奥行 (mm)	380	380	380	380	380	380
シート幅 (mm)(※1)	400 (360)	400 (360)	400 (360)	400 (360)	400 (360)	400 (360)
バックサポート高 (mm)	400	400	400	400	400	400
フットサポート・ シート間距離 (mm)	300/320/340	300/320/340	300/320/340	300/320/340	300/320/340	300/320/340
アームサポート高 (mm)	245	245	245	245	245	245
全高 (mm)	845	845	845	845	845	845
全幅 (mm)	550	490	550	490	550	490
全長 (mm)	960	960	960	960	960	960
折りたたみ全高 (mm)	670	670	670	670	670	670
折りたたみ全幅 (mm)	320	250	320	250	320	250
折りたたみ全長 (mm) (※2)	695 (920)	640 (870)	920	840	695 (920)	640 (870)
重量 (kg)	10.7	9.3	9.9	9.1	11.2	10.5