

# トイレチェア 組立説明書

## 必ずまもってください！


**危険：**どしんと勢よく腰掛けると、座面が割れることがありますので、ゆっくりと腰掛けてください。不安な方は、かならず介助を頼んでください。

**警告：**ねじがゆるんだまま腰掛けると、フレームが歪んで転倒することがありますので、ご使用前にねじを点検して締め直してからご使用ください。


**警告：**高さ調節のノッチボタンは、確実に穴から出ていることを確認してからご使用下さい。穴からはずれますと、急に座面が下がることがあります。

**警告：**乗り降りの際には、本体が動かないように必ずストッパーをかけてください。

**注意：**火や熱に接近、直射日光に当てたまますと歪みますので、日陰に保管してください。

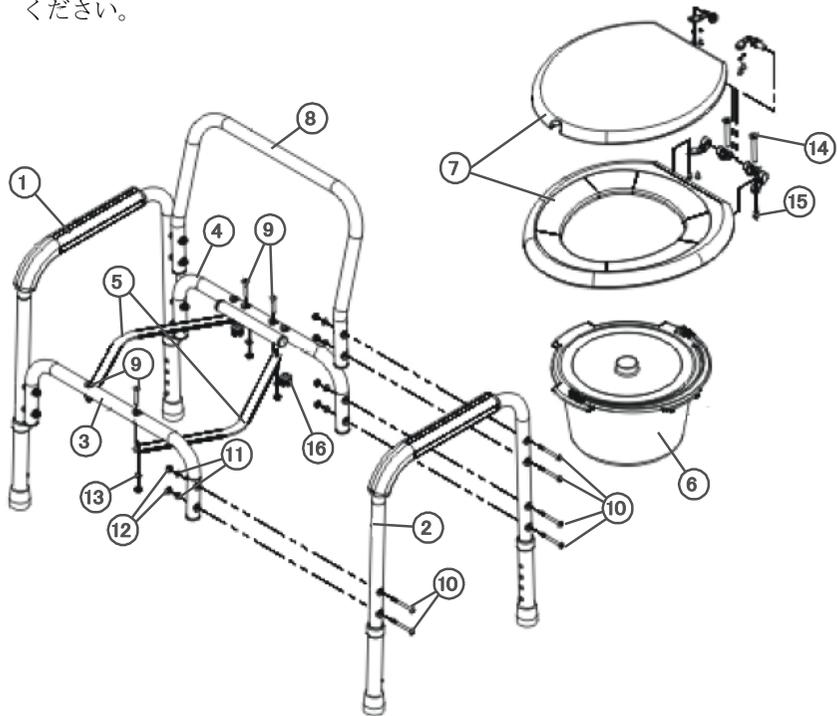


No	部品名	個数	No	部品名	個数
1	サイドフレーム右	1	9	ねじ(小) 35mm	4
2	サイドフレーム左	1	10	ねじ(大) 55mm	12
3	前部パイプ	1	11	波ワッシャー	12
4	後部パイプ	1	12	ナイロンナット	16
5	バケツ受け金具	2	13	平ワッシャー	4
6	バケツ	1	14	便座取付用ねじ	2
7	便座	1	15	便座取付ワッシャー	2
8	背部支持パイプ	1	16	便座取付ナット	2

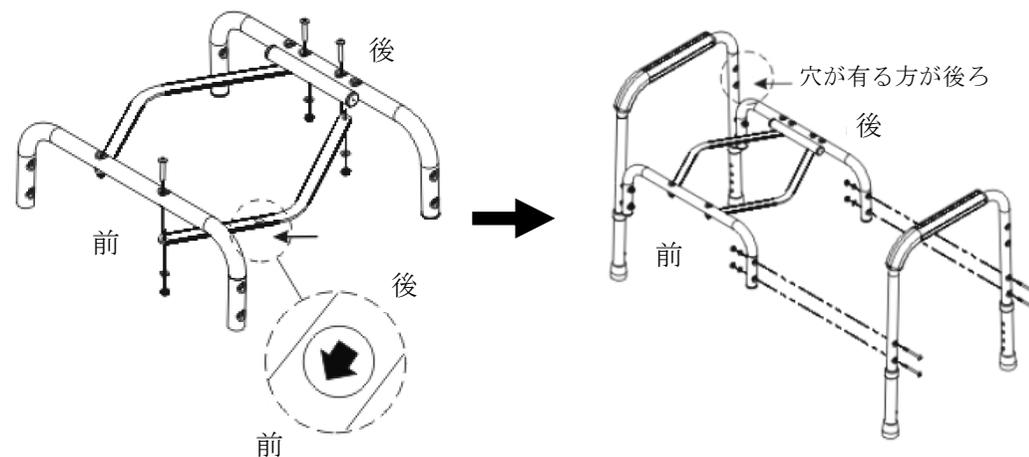

1. 前部フレーム③、後部フレーム④にバケツ受け金具⑤を取り付けます。ねじ(小)⑨、平ワッシャー⑬、ナイロンナット⑫で固定してください。バケツ受け金具の矢印の向きに注意してください。

2. サイドフレーム①②を取り付けます。ねじ(大)⑩、波ワッシャー⑪、ナイロンナット⑫で固定してください。

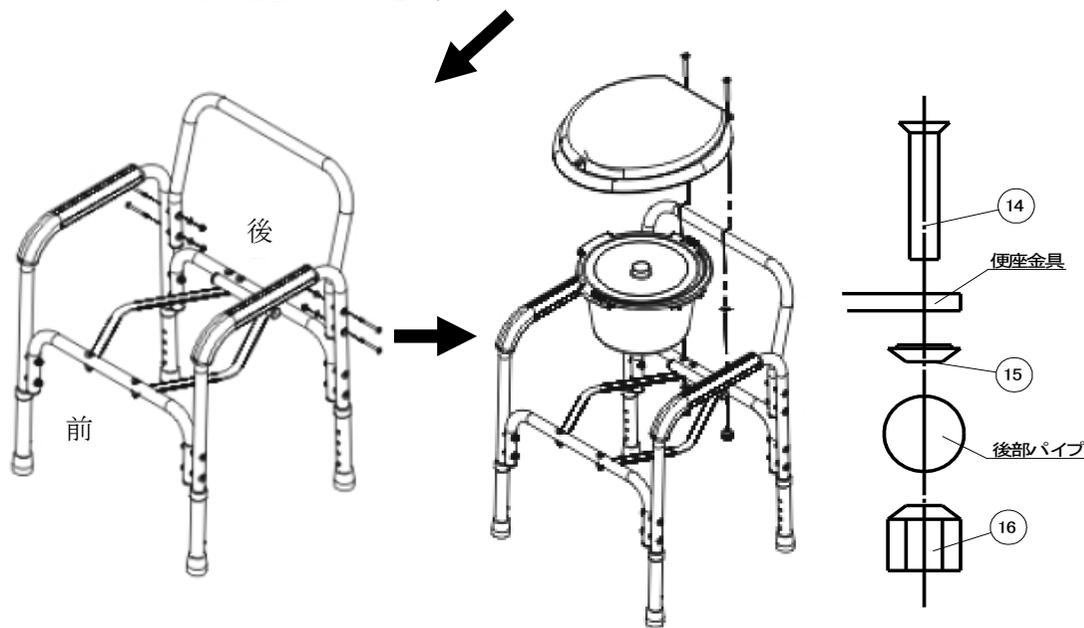

3. 背部支持パイプ⑧を取り付けます。ねじ(大)⑩、波ワッシャー⑪、ナイロンナット⑫で固定してください。

4. 便座⑦を後部パイプ④を取り付けます。便座取付用ねじ⑭、便座取付ワッシャー⑮、便座取付ナット⑯で固定します。バケツ⑥を装着します。