

MS-0009 スマートヘッドサポート

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。
また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。
使用者の身体の状況・環境の変化に合わせて、必要なときに本書をお読みください。

安全上のご注意

- ❗ 枕の位置および角度の調整を行なった場合は、可動部がしっかりと固定されていることを確認してください。
- ⊘ 本製品にバック等重いものを吊り下げないでください。
- ⊘ 本製品を手押しハンドルとして使用しないでください。
- ❗ 車いすを折りたたむ際は、ヘッドサポートフレームを受金具から外してください。
- ⊘ 枕に突起物を強く当てないでください。破損や変形の原因となります。
- ⊘ 枕の形状を変更するような加工はしないでください。破損の原因となります。
- ⊘ 本製品を積み重ねたり、枕に荷重がかかる状態で保管しないでください。破損や変形の恐れがあります。
- ❗ ヘッドサポートフレームを受金具に差し込む際に、ストッパーと受金具の間に身体、および衣服を挟まないように注意してください。

はじめにご確認ください

本製品購入後、はじめて梱包箱をあけるときに、下記のものが入っていることを確認してください。



No.	名称	入数
1	ヘッドサポートフレーム（枕つき）	1
2	受金具一式 左／右	各 1
3	ストッパー 左／右	各 1
4	平ワッシャー M5	2
5	ナベネジ M5×10	2
-	取扱説明書（本書）	1

<使用工具>


- ・ プラスドライバー ×1
- ・ スパナ（8mm） ×1
- ・ 六角レンチ（5mm） ×1
- ・ 六角レンチ（4mm） ×1
- ・ 六角レンチ（3mm） ×1

取り付けかた

受金具の取り付け

使用工具 プラスドライバー、六角レンチ（4mm）、スパナ（8mm）

- 1 受金具（２）のプレート六角レンチ（4mm）を使って外します。

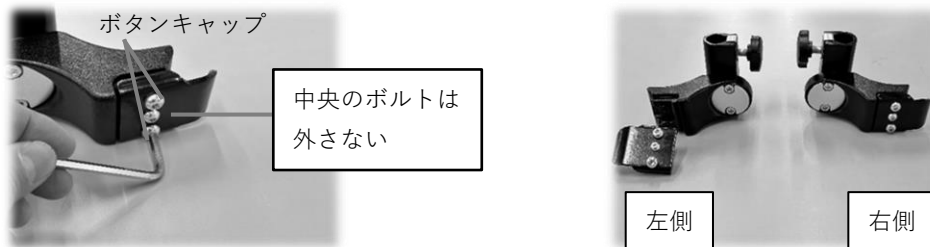

- 2 車いすの背シートを固定しているビスを外します。


※ 外したネジはこのあと使用しません。

- 3 背パイプにプレートを取り付けます

⚠ 背シートの上端から下になるよう位置を決めてください。



⚠ 背パイプのと受金具が合わない場合は、○部のナットをスパナ（8mm）で緩めて、爪をスライドさせて調整してください。調整後は、緩めたナットを再度固定してください。

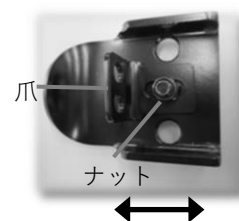

- 4 プラスドライバーを使って、平ワッシャー（４）とナベネジ（５）で、車いす本体に固定します。



- 5 外した受金具を再度合わせて、ボタンキャップで固定します。

※ 反対側も同様に作業してください


確実に固定されていることを確認してください。



ヘッドサポートの取り付け幅の調節

使用工具 六角レンチ (3mm)

- 1 ヘッドサポート (1) の2ヶ所のボタンキャップを六角レンチ (3mm) で緩めます。(外さないこと)

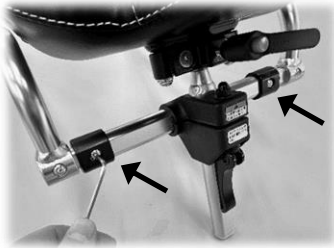

- 2 ストッパー (3) を挿入してから、車いすに取り付けた受金具に差し込みます。



シールを前方 (枕側)
キャップボルトを内側

- 3 ヘッドサポートフレームを左右にスライドさせて、フレームの幅を調整します。
位置を決めたら、緩めたボタンキャップを締めて固定します。
確実に固定されていることを確認してください。



つかいかた

ヘッドサポートの調節

● ヘッドサポートの高さの調節

使用工具 六角レンチ (4mm)

- 1 ヘッドサポートフレームを上下にスライドさせて、任意の位置に枕の高さを合わせます。
- 2 位置を決めたら、左右のノブボルトを固定します。
- 3 左右のストッパーを受金具の上に合わせて、キャップボルトを六角レンチ (4mm) で締めて固定します。
(以降、取り外したあとも高さの位置が固定されます)



ノブボルト



ストッパー

● ヘッドサポートの取り付け角度の調節

車いすの背角度に合わせて、ヘッドサポートの取り付け角度の調節ができます。

使用工具 六角レンチ (5mm)


- 1 左右のキャップボルト (左右各2本) を六角レンチ (5mm) で緩めて、ヘッドサポートの角度を調節します。
- 2 位置が決まったら、ふたたびすべてのキャップボルトを締めて固定します。



● 枕の前後左右の調節

使用者の状態に合わせて、枕の位置を前後左右の調節ができます。


- 1 クイックリリースレバーを倒します。
- 2 枕の位置を前後左右にスライドさせて、使用者の状態に合わせます。
- 3 位置が決まったら、クイックリリースレバーを起こして固定します。

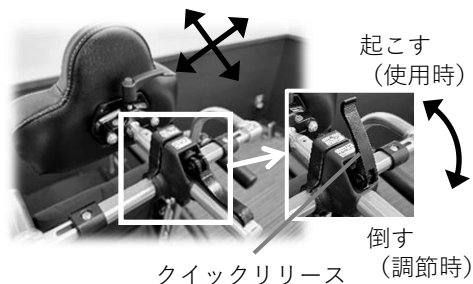

● 枕の角度の調節

使用者の状態に合わせて、枕の角度の調節ができます。

- 1 固定ボルトのレバーを左回りで緩めます。
 - 2 枕の角度を任意の位置に合わせます。
 - 3 位置が決まったら、固定ボルトのレバーを右回りで締めて固定します
- ※ 固定ボルトのレバーを引き上げてまわすと空回りをして、レバーの位置を調整できます。

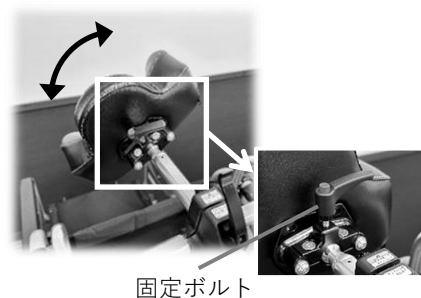

お手入れ・保管について

ヘッドサポートフレーム・受け金具のお手入れ

- ・ 本製品の汚れは、タオルかスポンジに中性洗剤を含ませて拭き取ってください。拭き取った後は、乾いた布で水分を拭き取ってください。

枕部分のお手入れ

- ・ 汚れは、柔らかい布やスポンジに中性洗剤を含ませてやさしく拭き取ってください。拭き取った後は、洗剤が残らないように水で洗い流し、水分を布で拭き取ってください。
- ・ シンナー、ベンジン等揮発性の高い溶剤は、使用はしないでください。製品を傷める恐れがあります。

保管について

- ・ 直射日光が当たる場所には保管しないでください。
- ・ 湿気の高い場所や室温の上がる場所には保管しないでください。
- ・ 枕を凹凸面上に置かないでください。変形の恐れがあります。
- ・ 火気に近づけないでください。
- ・ 枕に荷重がかかる状態で保管しないでください。変形の恐れがあります。

本製品の廃棄につきましては、最寄りの行政担当窓口におたずねください。
本書で使用している画像・イラストは、ご購入いただいた製品と異なる場合があります。

製造元

株式会社 ミ キ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

2401-004