


杖入れ 取付方法


- ①本体カップ
- ②クランプ(ボルト付)
- ③タイラップ
- ④固定用バンド

<使用工具>

- ・スパナ(10mm)
- ・ニッパー

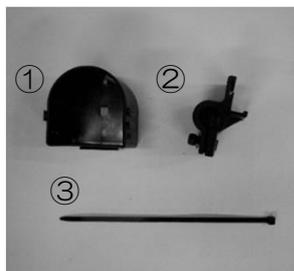


杖入れ一式

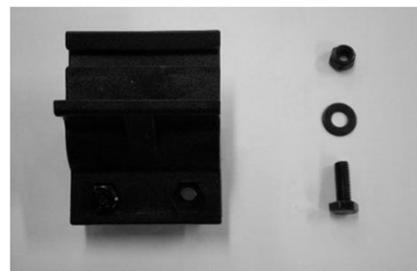


クランプ付属ボルト


組み付け方法 右側取付で説明

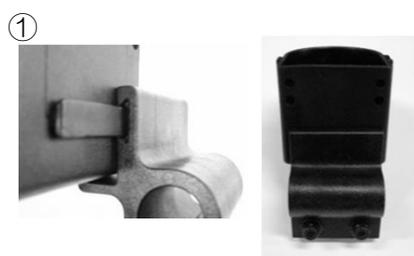

本体カップとクランプを溝を合わせて組み合わせます。クランプは、本体カップの真ん中まではめてください。

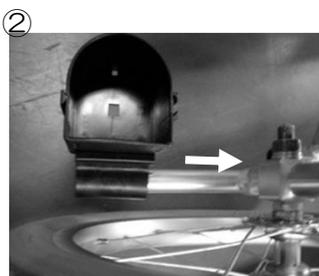

①で組み合わせた物をテッピンガーに差し込みます。

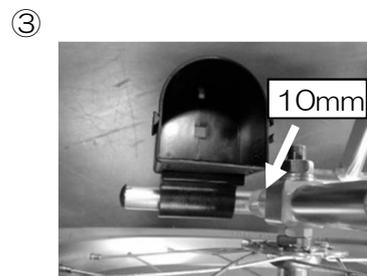

背パイプと杖入れのすきまが約10mmの位置まで差し込んでください。



本体カップが垂直になるよう調節し、10mmスパナで2箇所を締め、クランプを固定します。目安は自重で倒れない程度です。

⑨ 締めすぎると破断の原因になります。ご注意ください。



タイラップで杖入れを固定します。タイラップは締めていくと余分な箇所(写真、まる)ができますので、その余分な箇所をニッパーでカットします。

⑨ カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。



押手パイプを巻きつけるように、背シート上に固定用バンドを取り付けます。※オス側が露出しないように




完成。

松葉杖入れ 取付方法


- ①本体カップ×2個
- ②クランプ(ボルト付)
- ③タイラップ
- ④固定用バンド

<使用工具>

- ・スパナ(10mm)
- ・ニッパー

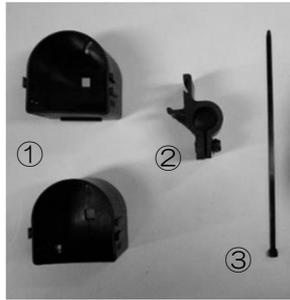


松葉杖入れ一式

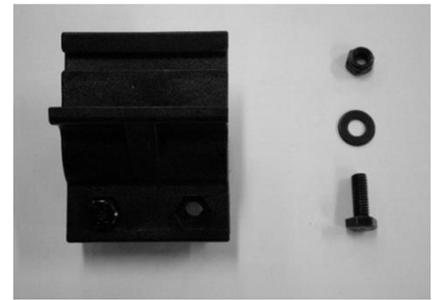


クランプ付属ボルト


組み付け方法 右側取付で説明

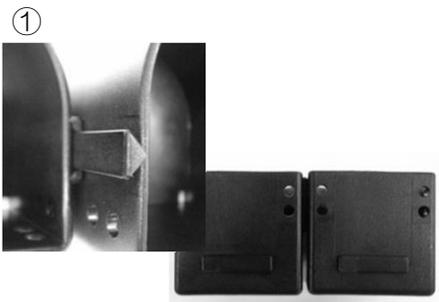

① 本体カップ側面の溝を合わせて上面が揃うように組み付けます。

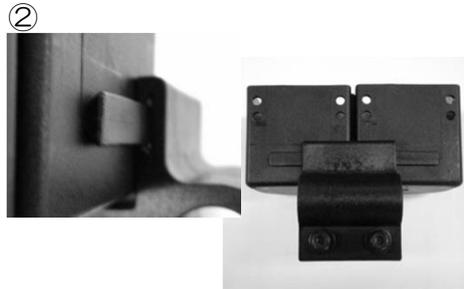

② ①で組み付けたものにクランプが中央にくるように取り付けます。

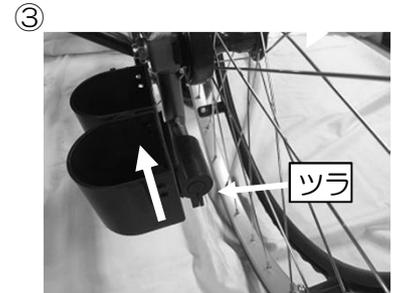

③ クランプを取付けたものをテッピングバーに差込みます。テッピングバーの先端とクランプがツラになるように位置を合わせます。



④ 本体カップが垂直になるよう調節し、10mmスパナで2箇所を締め、クランプを固定します。目安は自重で倒れない程度です。



⑤ タイラップで杖入れを固定します。タイラップは締めていくと余分な箇所(写真、まる)ができますので、その余分な箇所をニッパーでカットします。

⑥ ⑦ クランプの六角穴にボルトの頭をハメ、反対側のナットを締めてください。



完成。

⑧ カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。




グレー切ヤ-を巻かないように

⑥ 押手パイプを巻きつけるように、背シート上に固定用バンドを取り付けます。

※オス側が露出しないように

四点杖入れ 取付方法

- ①四点杖本体セット
(右に詳細示す)
- ②タイラップ
- ③固定用バンド

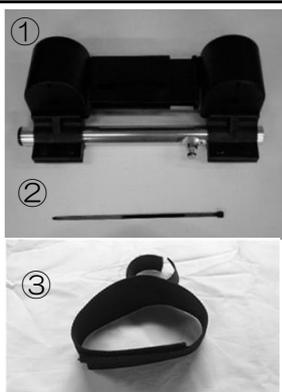


四点杖入れ一式

- ①本体カップ×2
- ②クランプ(ボルト付)×2
- ③延長テッピングバー
- ④調節ステー(3段階)

<使用工具>


- ・スパナ(10mm)
- ・ニッパー

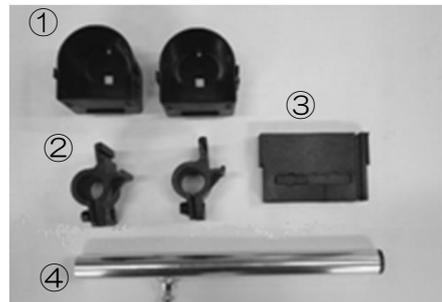

四点杖本体セット 詳細

組み付け方法 右側取付で説明

①

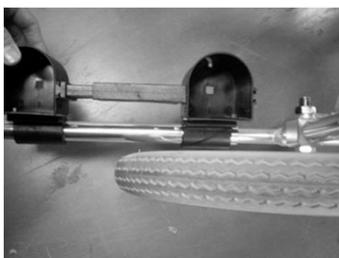

四点杖入れを本体カップが上を向くようにテッピングバーに差し込みます。
出来る限り奥まで差し込みます。

②



延長テッピングバーの付いている固定用ボルト(M6×20)を下に向け10mmスパナで締めつけ、延長テッピングバーが動かないよう固定します。


③



本体カップが垂直になるよう調節し、10mmスパナで2箇所をボルトを締め、クランプを固定します。

④ クランプの六角穴にボルトの頭をハメ、反対側のナットを締めてください。

④

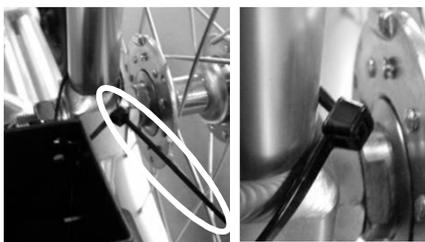

タイラップで杖入れを固定します。タイラップは締めていくと余分な箇所(写真、まる)ができますので、その余分な箇所をニッパーでカットします。

⑤ カットした断面で手や指を怪我しない様ご注意ください。

⑤



プレキチャーを巻かないように

押しパイプを巻きつけるように、背シート上に固定用バンドを取り付けます。
※オス側が露出しないように




完成。


(参考) 四点杖入れ 左右交換

- ①本体カップ×2
- ②クランプ(ボルト付)×2
- ③延長テッピングバー
- ④調節ステー(3段階)

<使用工具>
スパナ(10mm)

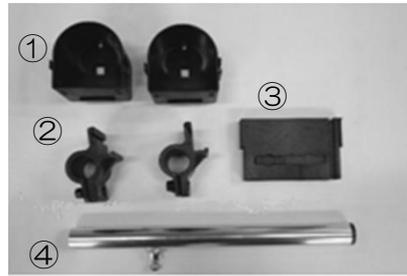


四点杖本体セット 詳細

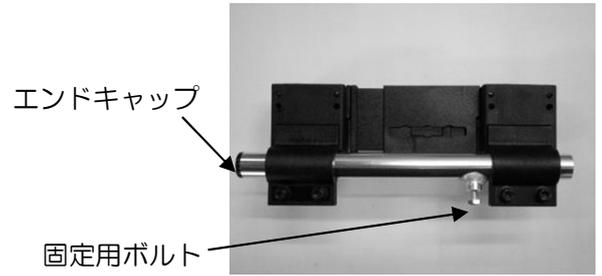

四点杖本体セット(右側用)

組み換え方法 右側⇒左側へ交換する場合

①

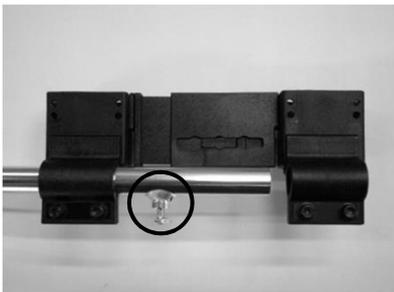

固定用ボルト(写真、まる)側からパイプをクランプから抜き取ります。

②



パイプを抜いたクランプを調節ステーから外します。

③




パイプをもう片方のクランプから抜き取ります。

④



②で外したクランプに反対のエンドキャップ側から差し込みます。出来る限り差し込んでください。

⑤

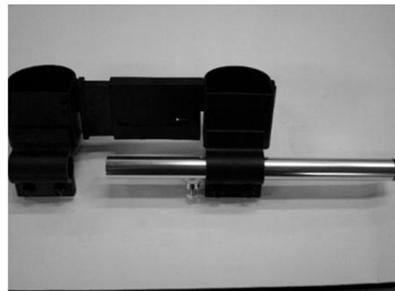

④でパイプを差し込んだクランプを調節ステーに取り付けます。

⑥



パイプを反対側のクランプに差し込んで、左側用完成です。