

取扱説明書


この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意・警告


- ・本製品はカルッタシリーズ／カルティマシリーズ専用の転倒防止バーです。他の商品には取り付けないでください。
- ・本製品の取付は、駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・本製品は左右セット品です。必ず左右両側に取り付けてください(片側だけの取り付けはしないでください)。
- ・本製品は、あくまでも後方への転倒を防ぐためのものです。目的以外の使用はしないでください。
- ・本製品の車輪が、常時接地し続ける状態で使用しないでください。

はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるときに、下記のものすべてが入っていることを確認してください。

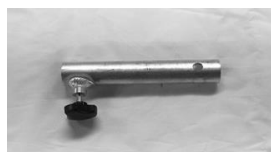

①

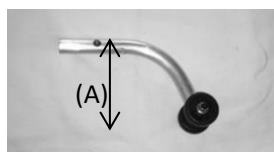

②

No.	名称	個数
①	延長ティッピングバー(ノブネジM6×15組付け)	2
②	転倒防止バー(ロックピン組付け)※	2

※品番によって、(A)の高さが異なります

MS-0028: 約14cm / MS-0029: 約11cm

MS-0034: 約9cm / MS-0035: 約3cm

取付方法

必ず左右両側にとりつけること

1. 両輪の駐車用ブレーキをかけます。
2. 延長ティッピングバーをノブネジ側から、奥まで差し込みます。
ノブネジは下を向け、ティッピングバーが動かないようしっかりと固定します。



3. 転倒防止は左右別部品です。
プッシュピンが「内側」に向いていることを確かめたうえで、転倒防止を写真のように差し込みます。
ピンが延長ティッピングバーの穴から出ていることを確認して、取付完了です。



ボンベ架との同時取付について

カルッタシリーズ／カルティマシリーズには、この転倒防止バーと同時取付ができるボンベ架がございます(別途購入品※)。

先にボンベ架を取付後、ティッピングバー先端のキャップを外し、転倒防止を写真のように差し込みます。

※必ず、ボンベ架の反対側にも、延長ティッピングバー⇒転倒防止を取り付けてください(片側だけの取り付けはしないでください)。



※CRT専用ボンベ架

MS-0026(CRT-1Lo・5Lo／CRT-1LoB用)

MS-0027(上記以外のCRTシリーズ)