

# MS-0039 Vシリーズ 転倒防止バー

## 取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

### 注意・警告

- ・本製品は、後方への転倒を防ぐためのものです。目的以外の使用はしないでください。
- ・本製品の取り付けは、駐管用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・本製品の車輪が、常時接地し続ける状態で使用しないでください。
- ・取付部にゆりみがないか定期的に点検してください。
- ・弊社製以外の車いすや、取付条件に該当しない車いすに取り付けしないでください。

### はじめにご確認ください

本製品購入後に、はじめて梱包箱をあけるときに、下記のものがすべて入っていることを確認してください。



No.	名称	個数
①	転倒防止バー	1
②	クランプ	1

<使用工具(付属されています)>  
六角レンチ(5mm) × 1

### 取付方法

1. 両輪の駐管用ブレーキをかけます。
2. 転倒防止バーを右側のティッピングバー(①)に半分ほど差し込んでから、クランプ(②)をフレームのパイプと、転倒防止のパイプにかませます。
3. クランプに取り付けられているボルト(2本)を、六角レンチで締めて、転倒防止バーを固定します。  
転倒防止が動かないことを確認してください。
4. 転倒防止のノブボルトをしっかりと固定してください。

