

MS-0015 ネクストローラー用ボンベ架


取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、理解し適切に取扱いしてください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

はじめにご確認ください

本製品ご購入後にはじめて梱包箱をあけるときに、下記の部品がすべて入っていることを確認してください。

	品名	数量
①	ボンベ架本体(内径130mm)	1
②	ステー	4
③	ノブ付きボルト (M6*50 キャップボルト 全 ユニクロ)	1
④	M6*30 ボタンキャップボルト ユニクロ	4
⑤	M6*20 ボタンキャップボルト ユニクロ	4
⑥	M6平ワッシャー ユニクロ	12
⑦	M6スプリングワッシャー ユニクロ	4
⑧	M6袋ナット ユニクロ	4
⑨	M6ナイロンナット 1種 ユニクロ	4

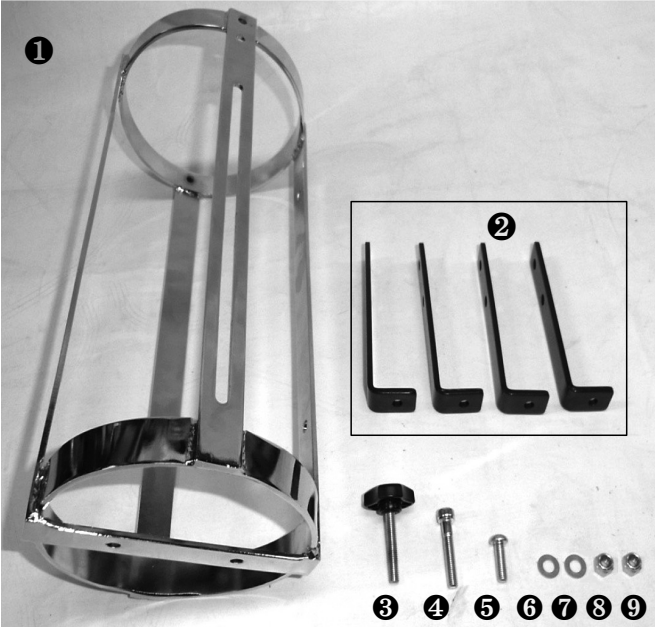

注意・警告


- ・本製品の取付けは、駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・酸素ボンベ以外は積載しないでください。
- ・ボンベを載せる際は事前にボンベ架がしっかり固定されていることを確認してください。
- ・アンダートレーなど併用される場合は、ボンベ架との干渉にご注意ください。
- ・こちらはネクストローラー専用のボンベ架となります。他の商品には取付けないでください。

作業手順

〔使用工具〕 六角レンチ4mm、スパナ10mm



1.ステーを車いす本体に取付ける

- ① 取付ける車いすの駐車用ブレーキをかけ、座のシートをすべて外します。
- ② M6*30ボタンキャップボルトをステーの穴に通してから車いすフレームの穴にボルトを通します。
- ③ 平ワッシャー、スプリングワッシャー、袋ナットで仮止めします。
- ④ 4ヶ所にこの作業を行います。


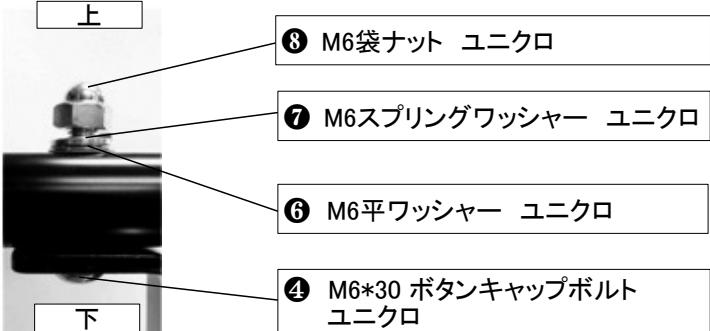


2.ポンベ架本体の取付け

- ①ポンベ架本体の開口部をフレームの後方に向けて、ポンベ架の側面に開いている穴をフレーム前方側はステーの下側の穴(A)に合わせ、フレーム後方側はステーの上側に開いている穴位置(B)に合わせてステーに取付けます。このとき、フレーム後方の上部部に、ポンベ架本体の開口部側面にあるM6のネジ穴(C)が上向きになるようにしてください。

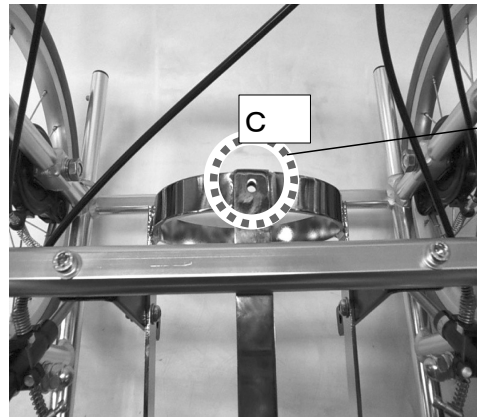
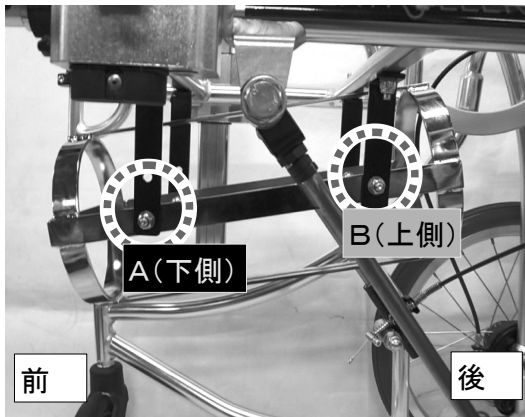


- ②①で指定した穴位置(AとB)でポンベ架本体とステーを取付ける際は、ポンベ架本体の内側からM6*20ボタンキャップボルトと平ワッシャーを通して、外側から平ワッシャーとナイロンナットで仮留めします。左右前後4箇所、ナイロンナットが脱落しない程度に仮留めしてください。

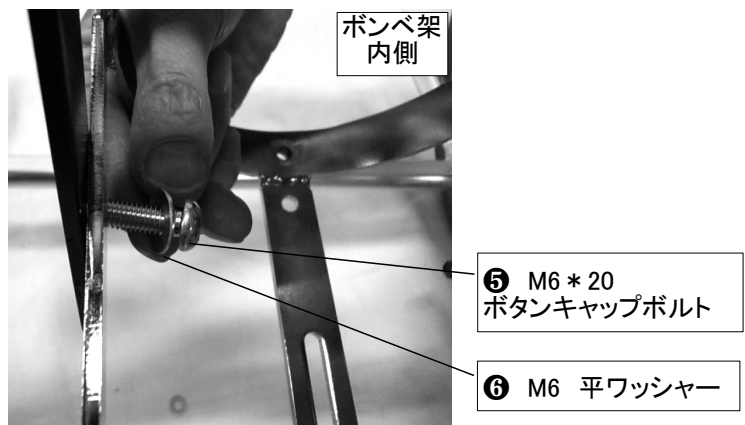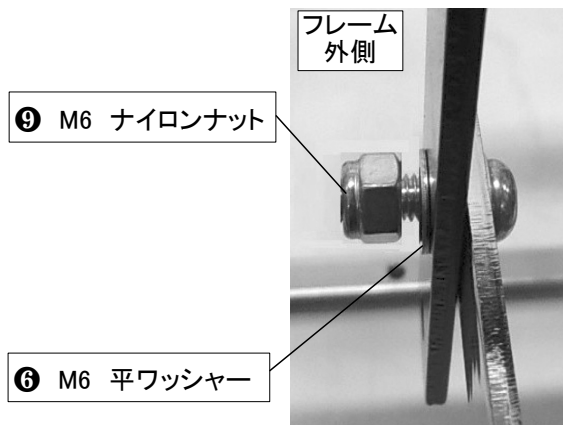

3.仮留めボルト・ナットの固定(※8箇所)

作業1.(A)、作業2.(B)で仮留めした計8箇所のボルトとナットを締めきって固定してください。固定したらポンベ架にガタ付きが無いか確認してください。最後に、ポンベ架本体にノブ付きボルトを取付けたら作業終了です。

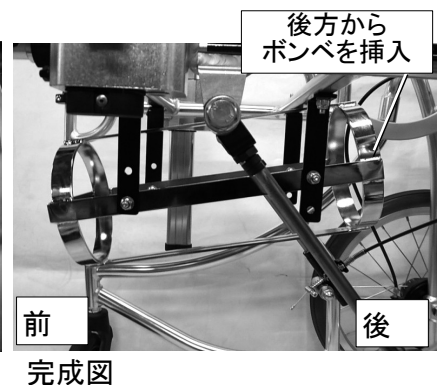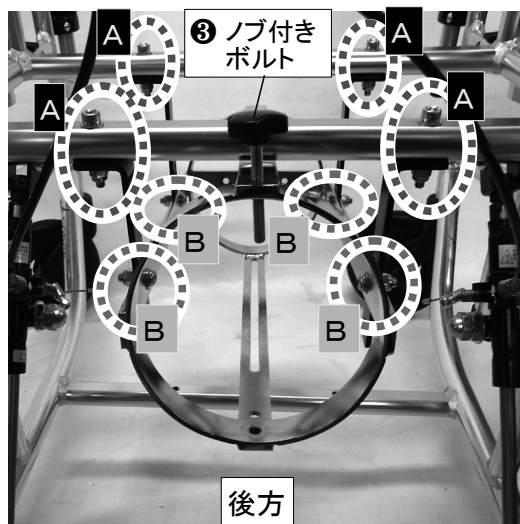

1307-002