
シャワーキャリー

[型式:MSC-1]

取扱説明書

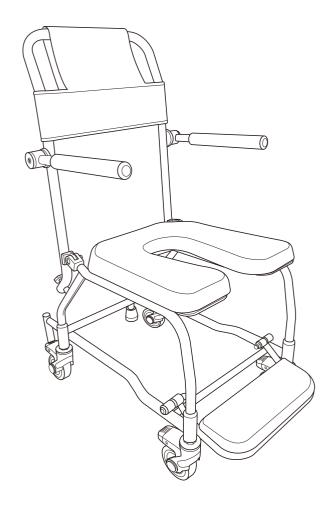

はじめに =

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

で使用前に本書を必ずお読みになり、十分に 理解をした上でお使いください。また、本書は いつでもご覧になれる所に大切に保管して おいてください。

使用者の身体の状況・環境の変化に合わせて、 必要なときに本書をお読みください。

目次

使用目的・特徴 ・・・・・・2
はじめにご確認ください2
安全上のご注意2
各部のなまえ 4
使いかた5
キャスタのロックのしかた5
転倒防止装置の取り付け・取り外し 5
バックサポートの開きかた/たたみかた 6
背シートの取り付け・取り外し 7
アームサポートの跳ね上げ8
フットサポートの開きかた/たたみかた 8
使用上のご注意9
保守・点検 9
お手入れ・保管について 9
困った時には10
仕様 裏表紙
アフターサービス 裏表紙
保証 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

使用目的・特徴

本製品は、入浴補助用具(シャワーキャリー)で、一人乗り用です。

車いす利用者など歩行が困難な使用者が搭乗して、介助者の補助のもと、使用者の身体を洗う目的で設計されています。

はじめにご確認ください

本製品をご購入後にはじめて梱包箱をあけるときに、下記のものがすべて入っていることを確認してください。

- 本体 1台
- 転倒防止装置 2本
- 取扱説明書(本書)
- 保証書

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書では、お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次の表示と記号を使って説明しています。表示と記号の意味をよく理解したうえで本文をお読みください。

【表示の意味】

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる ことが予想される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、重傷を負う可能性が予想される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性および物的障害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

<u>^</u>

警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

危険

0

各部を調節する際は、平坦な場所で行って ください。

本製品が動き出し、事故やけがにつながる 恐れがあります。



使用者を乗せたまま本製品を持ち上げないで ください。



乗り降りの際にはフットサポートに乗らないでください。

本製品が前方に浮き上がり、転倒して事故やけがにつながる恐れがあります。



使用者を乗せたまま坂や傾斜、段差のある 場所での移動は絶対に行わないでください。 転落や転倒など重大な事故やけがにつながる

恐れがあります。



使用しないときは、水平で平坦な場所に保管 してください。

坂や傾斜のある場所では、キャスタのロックを かけていても製品が動く場合があり、転倒など 事故につながる恐れがあります。

⚠警告

- 乗り降りの際および停止時、および浴室での 使用時には、必ず4輪すべてのキャスタの ロックをかけてください。
- 前かがみの状態など、前方向のみ体重をかけるような状況では、座面後方が浮き上がり前方に転倒する恐れがあります。



本製品の分解、構造を変更するような改造は行わないでください。

製品の強度や耐久性が損なわれ、転倒など事故やけがにつながる恐れがあります。

企注意

- 本製品は一人用です。二人以上の乗車や目的 以外での使用はしないでください。
- 使用中に異常な音や振動が発生したら、即時に使用を中止してください。 事故やけがにつながる恐れがあります。
- **全部を調節する場合は、指などを挟まないように注意してください。**
- 使用する前にキャスタ・アームサポートや フットサポート等の可動部のネジを点検し、 ゆるんでいるときは増し締めをしてください。
- 暖房器具に本製品を近づけないでください。 熱により変形したり火災の原因となる恐れが あります。破損した場合は使用をやめて必ず 修理してください。
- **シンナー・ベンジン等の溶剤は、使用しないでください。**

製品を痛める恐れがあります。



フットサポートを足で上げる場合は、素足で上げないでください。

けがをする恐れがあります。



フットサポートの下には足を入れないでください。

足を地面でこすったり、フットサポートやキャスタなどに足をぶつけてけがをする恐れがあります。

- \bigcirc
- 踏み台や脚立のかわりに使用しないでくだ さい。
- 0

跳ね上げ式アームサポート、フットサポート などの可動部に指や身体をはさまないよう 注意してください。



使用中、身体を乗り出さないでください。 安全を損ない危険です。

浴室での使用について

- ・ 本製品は浴槽の中に浸けることを目的としていません。必ず浴槽の外で使用してください。
- シャワーパットを浴槽の中に浸けたりしないでください。

パット内に水が浸入して、水が抜けなくなります。

- 浴室では、床面が濡れていたり石鹸などを使用するため、キャスタのロックをかけても本製品が動く場合があります。使用の際は充分に注意してください。
- 浴室での使用時は、平らな場所で使用して ください。

傾斜した場所で使用しないでください。

浴室での使用について


- 背シートの面ファスナーに糸くず、汚れ 等がついた際は、接着が弱くなりますので 取り除いてください。
- 使用前に、背シートの面ファスナーがしっかり止まっていることを確認してください。 背シートは取り外し可能な仕様になっています。外れると転倒して事故やけがにつながる恐れがあります。
- 使用後は、本製品に付着した石鹸などを ただちに洗い流したのち、乾いた布で水分 を拭き取りよく乾かしてください。

洗い流さずそのまま放置すると、製品に 残った石鹸などの成分や水分によって製品 の寿命を縮め、破損や故障の原因となります。

各部のなまえ

⚠注意

シャワーパット、フットサポートのパット部は固定式です。むやみに引っ張ったり、はがしたりしないでください。

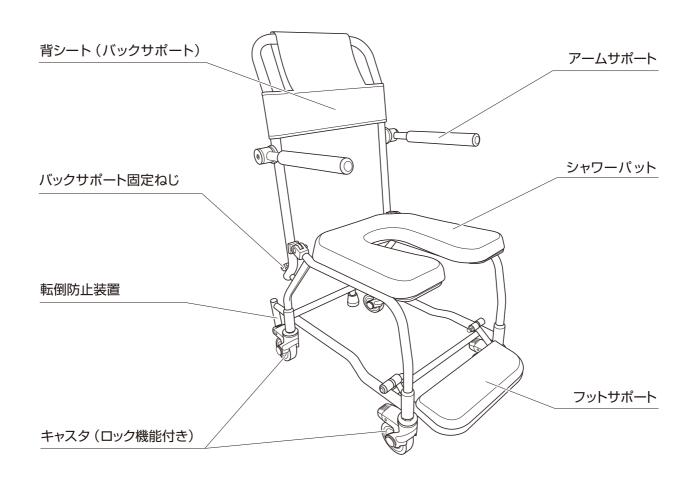

使いかた

キャスタのロックのしかた

爪警告

乗り降り際や停止時、および浴室での使用時には、必ず4輪すべてのキャスタのロックをかけてください。

● ロックのしかた -

キャスタにあるストッパーを下に下げると、キャスタにロックがかかります。



● 解除のしかた —

ストッパーを上に引き上げると、ロックが解除されます。



解除状態

転倒防止装置の取り付け・取り外し

⚠注意

- ・必ず転倒防止装置を取り付けた状態で使用してください。
- ・操作は、必ず4輪すべてのキャスタのロックをかけてから行ってください。

●取り付けかた─

(出荷時は取り付けられず同梱されています。)

転倒防止装置(2本)を、図の向きにして本体フレームに差し込み、ロックボタンが穴(A)から出ていることを確認してください。

*転倒防止装置が一時的にじゃまになるときは、 取り外し、または格納することができます。 通常は、転倒防止装置を図のようにセットした 状態でご使用ください。

●取り外しかた ———


ロックボタンを押した状態で、転倒防止装置を 引き抜いてください。

●転倒防止装置の格納 ―

ロックボタンを押した状態で、転倒防止装置を 横に180°回転させてください。

さらに、転倒防止装置を奥に押し込むと、ロックボタンが穴(B)から出て固定されます。

ロックボタンが穴(B)から出ていることを確認して ください。

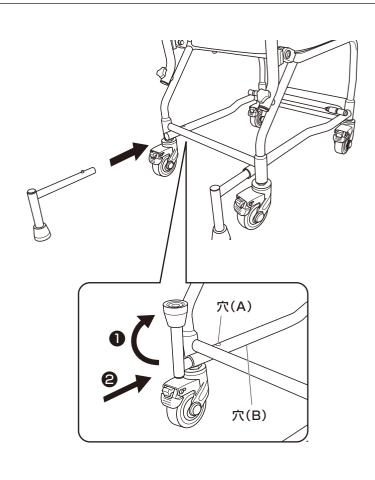


バックサポートの開きかた / たたみかた


● 開きかた —

(出荷時はバックサポートがたたまれた状態で梱包されています。必ず開いた状態で使用してください。)

- 1 4輪すべてのキャスタのロックをかけます。
- 2 バックサポート固定ねじ(2本)を取り外します。*ねじは再び使用します。なくさないよう注意してください。
- 3 バックサポートを起こします。
 - *バックサポートは、いっぱいまで起こしてください。

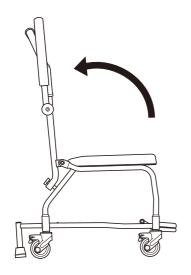

- **4** バックサポート固定ねじ (2本) を取り付け、締め 込みます。
 - *ねじがしっかりと締め込まれたことを確認して ください。

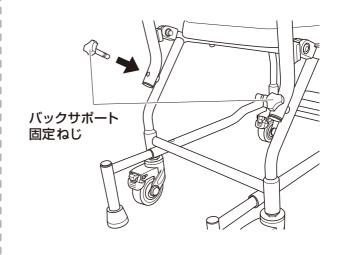

5 アームサポートを降ろします。 (P.8「アームサポートの跳ね上げ」参照)

● たたみかた

∧注意

たたむ際、バックサポートが勢いよく倒れることがあります。

バックサポートから手を離さないよう 操作してください。

- **1** 4輪すべてのキャスターのロックをかけます。
- アームサポートを跳ね上げます。(P.8「アームサポートの跳ね上げ」参照)
- 3 バックサポート固定ねじ(2本)を取り外します。*ねじは再び使用します。なくさないよう注意してください。

4 バックサポートを倒します。



5 バックサポート固定ねじ (2本)を取り付けます。

背シートの取り付け・取り外し


≜告

- ・必ず背シートを取り付けて使用してください。また、背シートを外して使用しないでください。 転倒など事故やけがにつながる恐れがあります。
- ・使用前に、背シート・レッグサポートの面ファスナーがしっかり止まっていることを確認してください。
- ・面ファスナーに糸くず、汚れ等がついた際は、接着が弱くなりますので取り除いてください。


● 取り付けかた -

(出荷時は取り付けられた状態となっております。)

- 1 4輪すべてのキャスタのロックをかけます。
- 2 背シートのベルトを背パイプに巻きつけ、 面ファスナーを貼り合わせます。

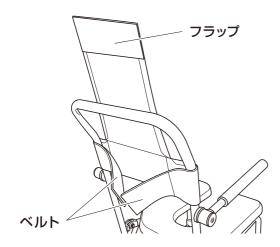

3 背シートのフラップを後方に折り返して、 背シート背面の面ファスナーを貼り合わせます。

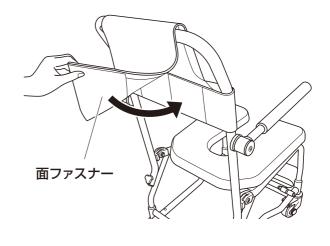

● 外しかた —

「取り付けかた」と逆の要領で行ってください。

アームサポートの跳ね上げ

アームサポートをワンタッチで後方へ跳ね上げることができます。

- ・操作は、必ず4輪すべてのキャスターのロックをかけてから行ってください。
- ・アームサポートを持って車いすを持ち上げないでください。 この製品は、アームサポートのロック機構がありません。アームサポートが勝手に動いて使用者の 転倒、落下などの事故やけがにつながる恐れがあります。
- ・アームサポートを跳ね上げて乗り降りする際は、アームサポートを最後まで跳ね上げたことを確認 してから行ってください。

アームサポートが身体、衣服に引っかかり、けがをする恐れがあります。

● 跳ね上げかた

⚠注意

アームサポートフレームを後方へ跳ね上げます。

*アームサポートフレームを上げた状態で、アームサポートに力を加えないでください。 フレームが変形し故障の原因となります。

● 戻しかた —

⚠注意

アームサポートを下ろすときは、身体をはさまないように注意してください。

アームサポートが止まるまで下ろします。



フットサポートの開きかた / たたみかた

⚠危険


乗り降りの際にはフットポートの上には乗らないでください。 本製品が前方に浮き上がり、転倒して事故やけがにつながる恐れがあります。

⚠注意

- ・乗り降りの際には、必ず4輪すべてのキャスタのロックをかけてください。
- ・フットサポートが足に当たらないよう注意してください。けがをする恐れがあります。


● 開きかた -

フットサポートを前方に開きます。

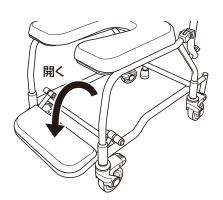

● たたみかた -

フットサポートを後方へ跳ね上げます。

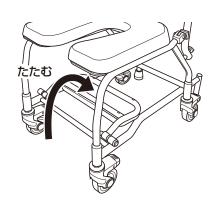

使用上のご注意

保守・点検

使用前には必ず下記の事項の点検・整備を行い、常に安全な状態で使用してください。

- * 点検の結果、作動不良や違和感を感じたときには、すぐに使用を止め、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ・キャスターのがたつき、ロック機構の動作や効き
- ・各部のひび割れ、欠け、変形
- 各部のねじのゆるみやがたつき
- ・パッド、シート類のほつれ、破れ、切れ目
- 面ファスナーの接着
- ・その他の異常
- * 本製品は熱気、湿気に弱いため、湿気の多い所、外部、自動車内での長期放置や、水のかかる場所、直射日光の当たる場所には放置しないでください。

● 消耗品、交換部品の確認

⚠注意

交換時期を過ぎての使用は、転落、転倒などの事故につながる恐れがあります。

・それぞれの部品が交換時期になったときは、お早めに交換してください。 新しい部品に交換する際は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

消耗品・交換部品

品名	交 換 時 期
キャスター	表面の摩耗が著しいとき。ロック機構が効かなくなったとき。
シート	ほつれ、切れ目が発生したとき。 ひどく汚れたとき。 面ファスナーの接着が弱くなったとき。
パット	フレームとの接着がはがれてきたとき。 ひどく汚れたとき。 劣化が著しいとき。

お手入れ・保管について

⚠注意

シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。製品を傷める恐れがあります。本体ならびに各部品を乾かすときは、直射日光をさけて陰干ししてください。

● フレームのお手入れ

- ・フレームの汚れは、タオルかスポンジに中性洗剤を含ませて拭き取ってください。拭き取った後は、乾いた 布で水分を拭き取りよく乾かしてください。
- ・水などがかかった場合は、乾いた布で水分を拭き取りよく乾かしてください。

● パット、シートのお手入れ

- ・パット、シートが汚れた場合は、中性洗剤を染み込ませた布で汚れを拭き取った後、水で濡らした布で洗剤を 拭き取り、その後乾いた布で水分を拭き取りよく乾かしてください。
- ・飲み物などの液体をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
- ・面ファスナーに糸くず、汚れ等がついた際は、接着が弱くなりますので取り除いてください。

● 樹脂部品のお手入れ

樹脂部品の汚れは中性洗剤で落としてください。

● キャスターのお手入れ

・キャスターが汚れた場合は、中性洗剤を使用して擦り洗いをしてください。水に濡れた後は、乾いた布で水分を 拭き取りよく乾かしてください。

● 保管・収納について

・錆や劣化を避けるため、湿気が高い場所や室温の上がる場所、直射日光が当たる場所には保管しないでください。

困った時には

本製品を使用されていて『故障かな?』と思ったときは、販売店へ連絡する前に下記項目を確認してください。

症状	確認点	対 処	
	可動部分の錆び、摩耗·汚れ· 油ぎれなどによっておこる 摩擦音がしていませんか。		
異音がする。	ボルト類のゆるみ等がおきて いませんか。	お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。	
	フレームに歪みが発生して いませんか。		

仕 様

単位mm

	機種名	
	MSC-1	
フレーム材料	アルミ	
シート材料	ポリエチレン、EVAフォーム	
アームサポートタイプ	開閉式(ウイング)	
アームサポート	EVAフォーム	
サイドガード	なし	
バックサポート	面ファスナー固定	
背折れ	なし	
フットサポート	折りたたみ式	
キャスタ	3" ロック機能付き	

半	
測定項目	機種名
州足坝口	MSC-1
キャスタ径 (inch)	3
前座高	410
後座高	395
シート奥行	380
シート幅 ※1	380(370)
バックサポート高	480
フットサポート・シート間距離	260
アームサポート高	225
全高	850
全幅	440
全長	680
折りたたみ全高	485
折りたたみ全幅	440
折りたたみ全長※2	610
重量(kg)	6.0

※1 ()内はアームサポートパイプ内々の寸法です。 ※2 転倒防止装置を格納したときのサイズです。

アフターサービス

- ・万一故障の場合は、お買い上げの販売店、または弊社へこの商品の品名および故障状況をご連絡ください。
- ・保証期間内の場合は、保証書の提示が必要となります。

保証

- ・保証内容につきましては、同封の保証書をご覧ください。
- ・保証期間終了後の修理については、お買い上げの販売店、または弊社へお申しつけください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有償修理いたします。

本製品の廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。

製造元



〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目 38 番 10 号