

VA-ODX

補足取扱説明書

本書は、VA-ODXの補足取扱説明書になります。ご使用前に本書と「車いす取扱説明書」を必ずお読みになり、十分に理解した上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管しておいてください。使用者の身体状況・環境の変化に合わせて、必要なときにお読みください。

ボンベ架について

本製品には転倒防止付きバー付ボンベ架が標準装備されています。

⚠警告	<ul style="list-style-type: none">・ボンベ設置以外での使用はしないでください。・ボンベを搭載する際はボンベ架がしっかり固定されていることを確認してから載せてください。・ボンベ架にボンベを搭載して使用する場合は、他の荷物や重量のあるものを車いすの後方に取り付けしないでください。荷重が車いす後方に集中して、転倒事故につながる恐れがあります。・ボンベを搭載する際は、手押しハンドルや背シートポケット等後方に荷重がかからないようご利用ください。・転倒防止バーを外したり、切断するなどの改造は絶対に行わないでください。
-----	--

●ボンベの搭載

ボンベを搭載する際は、ノブボルトを締め付けて、確実に固定されていることを確認してください。



仕様

単位mm

	機種名 VA-ODX
フレーム材料	アルミ
シート材料	ビニールレザー
アームサポートタイプ	固定式
アームサポート	ウレタン
サイドガード	ポリプロピレン
グリップ	PVC
バックサポート	スリングシート
背折れ	なし
フット・レッグサポートタイプ	固定式
フットサポート	軽量
キャスト	ソリッド
タイヤ	ハイポリマータイヤ
制動用ブレーキ	なし
ハンドリム	ブラハンドリム
駐車用ブレーキ	引き掛け式トルブレーキ

測定項目	機種名 VA-ODX
駆動輪(主輪)(inch)	22
キャスト径(inch)	6
前座高	435
後座高	410
シート奥行	400
シート幅	400
バックサポート高	380
フットサポート・シート間距離	340/360/380
アームサポート高	240
全高	830
全幅	625
全長	970
折りたたみ全高	830
折りたたみ全幅	320
折りたたみ全長	955
重量(kg)	13.9

静的安定性試験方法(弊社ではJIS T9201 10.1.2a方式にて試験を行っています。)
キャストが交換可能な場合、推奨するキャスト径は上記キャスト径になります。

保証書

機種名

シリアルNo.

VA-0DX

保証の範囲

- ① 取扱説明書(補足取扱説明書含む)に基づいた正常な使用状態で異常や故障が発生した場合、無償修理をいたします。
- ② 保証期間はご購入後1ヶ年です。
(但し、シート・クッションカバー類、タイヤ、チューブ、虫ゴム、キャスト、ベアリング、ワイヤー、先ゴム等の消耗部品は除きます。)
- ③ 次の場合は保証期間中でも有償修理といたします。
(イ) 使用上の誤り及び取扱不注意による破損
(ロ) 地震、台風、水害などの天災及び事故、火災による焼失・破損
(ハ) 保全上の不備及び弊社以外で行った修理や改造による破損
(ニ) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
(ホ) 保証書にお買い上げ日、販売店名の記載・捺印のない場合
(ヘ) 保証書のご提示がない場合
- ④ この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only within Japan.
- ⑤ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合はお買い上げの販売店へ保証書を添えてお申し出ください。

ご注意

保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

※お買い上げ日、販売店名の記載・捺印のない場合無効となります。

ご住所 〒

販売店

住所

TEL

お名前

店名

お買い上げ日

年 月 日

TEL

印

製造元

 Wheel Chair
Miki 株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号
TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。