



RSH-3

洗って、すぐ使える。^{Wheel Chair} **Miki**

充実装備の軽量・コンパクト車いす。

洗浄機対応 介護施設・レンタル事業者向け

Rakush 楽ッシュ

洗いやすく、乾きやすく、整備しやすい。
三つの使いやすさ。

その手間が、
ぐっと減ります。

※ は洗浄機対応マークです。

案1 洗いやすい、乾きやすい —— 洗ったら、早く乾く。それには理由がある。……………

置くだけで水が流れるフレーム構造、
水抜きの手間を軽減！

標準車いすのフレーム角度は地面
に対して4°、この車いすは12°。
上の写真のように置くだけで水が
自然と排出され、洗浄後もフレーム
内部に水が残りにくくなります。



クッション素材を刷新、脱水後も乾きやすく。

脱水後に乾きにくい原因は、シート
内部のウレタンクッションの水通
りが悪いから。ポリエステル素材
を三次元状に絡ませたクッション
に変更したことで、水がスムーズに
抜けるようになり、脱水後の乾燥
が早くなりました。



シートは工具不要で着脱、
洗濯機で洗える。

シートは工具不要で着脱※でき、洗
濯機で洗濯・脱水が可能。乾きや
すい素材のため、洗濯後の乾燥時
間を減らせます。

※インナーシート上側のみビス固定あり。



シートは工具不要で取り外し

洗浄機で数台まとめて
洗える、スリット横板。

横板のスリット加工により洗浄時
の水を遮らず、数台まとめて洗う場
合も洗浄液がフレーム全体に行き
渡りやすくなります。



乾燥待ちが減れば、
出荷が早くなる！

洗浄機 + 乾燥機使用時
標準車と比べて
30分短縮

洗浄 + 乾燥時間を比較
標準車いす: 85分

本製品(楽ッシュ): **55分**

<測定条件>

- 車いす: 自社標準車いす 及び Rakush
シートとクッションを外した状態
- カゴ台車を使用し、上下2台ずつ横込み
- 乾燥前にエアブロー有(車いす全面 及び パイプ内部)

※弊社評価条件での参考値です。

稼働効率
アップ!



案2 整備しやすい —— 手間を減らして、スムーズに。……………

駐車ブレーキを迷わず、
確実に再取り付け。

ブレーキプレートの目安メモリで
組付け位置を確認。長穴にはまる
突起で傾きを防止。スライドさせて
位置を決めて確実に固定できます。



フットサポートは
工具不要で差し替え。

ボタンをつまんで引くだけで位置
調節・着脱が可能。ボルト固定な
しで、差し替えも出荷時の位置調
整も工具不要で完結します。



キャストはワンタッチ着脱。

キャストフォークからワンタッチで
取り外し可能。ボルト固定なしで、
汚れが絡まりやすいキャストの掃
除も交換も工具不要で完結します。



傷んだシートも、工具不要で交換。

シートは工具不要で着脱※。汚れや傷みが見つかった
時も、シート交換で対応しやすい構造です。手間をか
けずに、すぐに清潔な状態へ。

※インナーシート上側のみビス固定あり。



楽ッシュの
動画・情報は
こちらから

使う人にも、支える人にも。充実装備の軽量・コンパクト車です。



シートカラー：
ライトブルー(A-25)

補装具 レディメイド式



シートカラー：
グレージュ(A-24)

補装具 レディメイド式

品番 **RSH-3** らく 楽ツシュ

¥165,000 (非課税価格)

自走型


重量: 11.7kg※1

前座高: 405(435※1)mm

● TAIS / 00122-000724 ● 商品コード / CJ01207

- 駆動輪22インチハイポリマータイヤ、3Dランバーサポートフレーム、前ズレしにくいシート形状、スライド延長ブレーキ

■ 寸法詳細

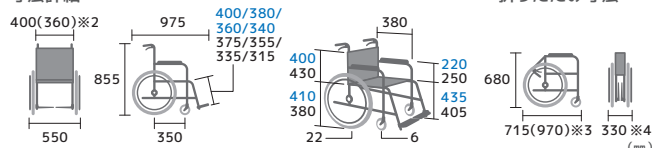

■ 折りたたみ寸法

■ カテゴリー&機能マーク



品番 **RSH-4** らく 楽ツシュ

¥165,000 (非課税価格)

介助型


重量: 10.0kg※1

前座高: 405(435※1)mm

● TAIS / 00122-000725 ● 商品コード / CJ01208

- 主輪14インチハイポリマータイヤ、3Dランバーサポートフレーム、前ズレしにくいシート形状、スライド延長ブレーキ

■ 寸法詳細

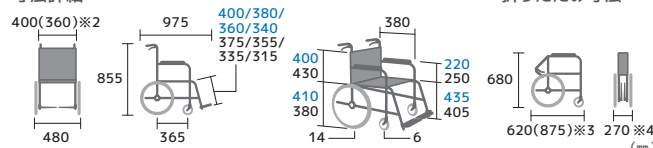

■ 折りたたみ寸法

■ シートカラー

耐荷重100kg

グレージュ(A-24)

ライトブルー(A-25)

品番・シートカラー・商品コードを
発注時にご指定ください。

*スペックの青文字はクッション込の寸法です。 ※1 クッションを含む ※2 シート幅はアームパイプ内寸の寸法、()内は座シートの寸法です。 ※3 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままの寸法です。 ※4 折りたたみ寸法の場合は、ワンタッチソフトシート・クッション(背・座)を外したときの寸法です。 ※5 ハイポリマータイヤ(ノーバンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。 ※ミキの車いすは折りたたためて、収納や車への積み込みにも適しています。



姿勢をしっかりサポート

- ① 3Dランバーサポートが骨盤を包み込み、
- ② 座面後方が緩やかに沈み込むシート形状と合わせて、お尻の前ズレを抑え、安定した座位を保ちます。



軽い力でかけられる、 スライド延長ブレーキ

レバーを引き出すと90mmまで延長。従来品より25mm長くなりました。握りやすい形状とテコの原理により、軽い力でブレーキをかけられます。



机に、より近づける 水平アームサポート

アームサポートを水平形状にすることで、机の下に入り込みやすくなり、より近くまで寄せられるようになりました。アームサポートの高さ: 地面から約63cm



ステップの高さ調整が簡単、 軽量ワンタッチプル式ステップ

ボタンをつまんで引くだけでステップの高さ調整が可能。従来品のワンタッチ式ステップより軽量・低ガタつきで、足元の快適さが格段に上がります。

Wheel Chair
Miki

株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

会社や商品についての情報のご確認は、Mikiホームページまで

<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>



商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで

〒484-0928 愛知県犬山市宇七ツ屋51-3

TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。

お問い合わせ

※掲載の価格は非課税価格です。 26.10